

Õhusurvega silmade massaaziseade


AST-213

Toote kasutusjuhend

Ohutusabinõud

- Lapsed ja puuetega inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelevalve all.
- Kui teil tekib seadme kasutamisel füüsimisi ebamugavusi või tunnete ennast tavapäratult siis lõpetage kohe seadme kasutus ja konsulteerige oma arstiga.
- Juhul kui ilmneb, et seade või laadimisjuhe on vigastatud, ärge seadet kasutage.
- Enne laadimist veendu, et laadija ja seade on kuivad ja pole niiskunud.
- Juhul kui seade või laadija on kokkupuutunud veega siis seda ei tohi vooluvõrku ühendada ja kasutada.
- Kui kasutate seda seadet siis samaaegselt ei tohi teisi analoogseid seadmeid kasutada.
- Ärge kasutage seda haiguse korral ravi eesmärgil.
- Ärge kasutage seda mitmekesi korraga
- Ärge kasutage seda alkoholi joores
- seda on soovitatav kasutada 15 min ühe korra kohta.
- Ära lase seadmel maha kukkuda ja ära tõmba voolujuhtmest, et seadet liigutada, see võib seadet kahjustada.
- Inimesed kellel on silma haiguste sümptomid ei tohi seda seadet kasutada, ärge kasutage peale silma operatsiooni kuni 6 kuud, silma glaukoomi, katarakti ja võrkkesta kahjustuste puhul on selle seadme kasutamine keelatud.
- Ära kasuta seda seadet kui sul on silmaümbruses traumasi ja nahavigastusi.


Komponendid ja funktsioonid

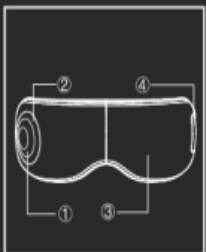

1. Juht paneel
2. Ekraan
3. Plast kate
4. USB pesa



Laadija

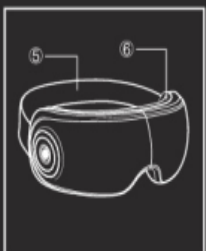

5. elastic pael
6. riidest kate



USB kaabel

Täname, et olete valinud silmade massaaziseadme 213. Enne seadme kasutust palun lugege see kasutusjuhend läbi ja pöörake erilist tähelepanu ohutuse juhendile, et tagada toote laitmatu töö ja kasutus

Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas tuleviku tarbeks alles.

1. Ohutusjuhend	1
2. Seadme osad	3
3. Seadme iseloomustus	3
4. Seadme juhtnupu tutvustus	4
5. Kasutusjuhend	5
6. Laadimise juhend	6
7. Hooldus ja kaitse	7
8. Rikkeotsing	8
9. Tehnilised parameetrid	9

Ohutusabinõud

- inimesed kes kasutavad kehasiseseid meditsiinilisi elektroonilisi seadmeid nagu südame rütmi seade, ärge kasutage seda seadet.
- haiguste puhul nagu kasvajak, südame vaegused, kõrgevererõhu tõbi, peab olema eriti ettevaatlik seda seadet kasutades. Jälgige ennast hoollega.
- kui teil on kehatemperatuur üle 38C (palavik) siis ärge kasutage seda seadet.
- Kui kasutate seadet siis hoidke pead püsti ja kergelt nägu ülespoole suunatult.
- Ärge eemaldage iseseisvalt seadmest osasi, see võib kahjustada seadet ja selle toimimist.
- Lisaks tootjapoolsele määratud hooldustehnikule ei ole see toode komposteeritav, modifitseeritav ega iseseisvalt parandatav. Juhul kui tekib selle seadmega küsimusi võtke ühendust maaletoojaga.
- Laadimiseks kasutage ainult õige pingega laadimisseedet, kõrgem voolupinge kahjustab seadet.
- Toitejuhtme lahtiühendamisel hoidke kinni laadurist mitte juhtmest
- Ärge kahjustage kaablit kokku voltides, venitades, ja muul viisil
- Kui olete kahjustanud laadimise juhet, ärge kasutage suvalist asenduseks, pöörduge kvalifitseeritud spetsialisti poole.
- Laadimiseks kasutage seadmele sobivat laadiat, juhul kui vajate laadija vahetust pöörduge vastava spetsialisti poole.

Juhtnupp, ekraan



Juhtnupp

- käivita muusika/ muuda tugevust +
- järgmine muusika / vähenda helitugevust -
- Start / stop
- Vibratsioon
- Soojendus



ekraan

- Muusika lamp
- Vibratsiooni lamp
- Aku lamp
- Soojenduse lamp


Kasutus juhend

- vajutage Start nuppu, õhkpadjad ja muusika avanevad samal ajal, seadme töörežiimi lamp helendab.
- Vajutage just nuppu 3 sek siis seade alustab tööd. Helimärgi nuppudega saate seadistada muusika endale sobivaks.
- Vibratsiooni ja soojenduse funktsioone saate valikuliselt kasutada oma soovide kohaselt.
- Kui soovite avalikus kohas muusikat kuulates teisi mitte segada siis kasutage kõrvklappe
- Kui aku võimsust ei ole piisavalt siis aku tuluke vilgub punaselt. Ühendage USB kaabel laadijaga vooluvõrku siis laadimise indikaatori tuluke läheb punaseks. Valge tuluke näitab, et laadimine on lõppenud ja aku on täis. USB kaabliga saate ühendada seadme arvutiga ning laadida lisaks omale sobivat muusikat ja samal ajal ka laadida akut.
- Ettevaatust !
- seadistatud tööaeg seadmel on 15 min. kui aeg saab täis siis lõlitub seade automaatselt välja. Kui soovite korrata siis käivitage seade uuesti.
- Seadme kasutamiseks eemaldage kontakt läätsed ja muud peas olevad segavad asjad , juukseklambriid jne.
- Kandmise viis
- Enne käivitamist pange seade pähe kattes pehme kanga poolega silmad, seadistage seade omale mugavaks.
- Tõhusad silmamassaaži harjutused
- Kergendab silmade väsimust
- Silma massöör stimuleerib silmakudede talitust ja naharakkude talitust , muudab silmad säravaks ja selgeks, parandab nägemist ja hoiab ära müoopiat.
- Rahustab närvisüsteemi ja parandab une kvaliteeti. Läbi näolihaste masseerimise paraneb ka aju vereringe talitus ja alandab ajus vererõhku, parandab aju tegevust

Hooldamine ja kaitse


Hooldus

Kui seade on määratud siis pühkige seda pehme lapiga
Kui seade on väga määratud siis kasutage puhastuseks puuvillast lappi ja võite kasutada alkoholi sisaldavat puhastusainet

 Caution	Vee ja teiste korrosiooni tekitavate vedelikega puhastamine on keelatud. Kui seadmel on probleeme siis pöörduge eriala spetsialisti poole.
--	--

Kaitse

Peale seadme kasutamist paigalda see turvalisse kohta ja hoiu seda karbis
Ärge asetage seadmele raskeid esemeid, ärge tehke seda märjaks või niiskeks, ärge visake seda biojätmetesse või loodusesse.


 Caution	Ärge pange seda seadet kuuma kohta või kuuma vette Ärge jätke seda seadet lastele mängimiseks
--	--

Tehnilised parameetrid

Toote nimetus	Õhusurve Silmade massöör	Võimsus	< 6W
TF kaarti	128MB	Pinge	DC3.7V
Elektrivarustus	DC 5V 1000mA	Töövool	300 -1300mA

Laadimine

- Avage voolu ühenduse karbi kaan seadme vasakul küljel, ühendage USB juhe laadijaga ja seejärel ühendage väike DC ühendus seadmega.
- Ühendage laadija vooluvõrku milles on 100-240V, 50/60Hz.
- Kui laadija on ühendatud siis laadimise tuluke ekraanil hakkab põlema
- Seadme aku täislaadimine võtab kuni 3 tundi

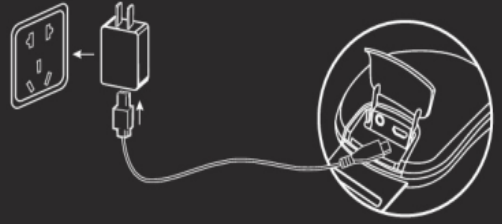

Ettevaatust !

Laadimise ajal ärge kasutage seadet
Kasutage vastavat sisseehitatud laadijat
Ärge murteke juhete see võib seda vigastada i

Rikkeotsing

Ilmnenud viga	Võimalikud põhjused	Lahendamine
Ei käivitu	Lüliti pole sees	Lülita sisse
	Aku on tühi	Lae akut
	Aeg on läbi	Vajuta lüliti
ei lae	kaabel pole ühendatud	Ühenda kaabel
Indikaatori lamp on tume või fikseerunud	Aku on tühi	Vajab laadimist
Õhusurve on nõrk		

Kui ilmneb muid probleeme siis võta ühendust seadme müüjaga või pöördu vastava spetsialisti poole ,

Tootja :

ADD: No.43, Longfeng Road, Xincheng,
Longgang, Shenzhen, China
Tel: 0755-27377078
Web: www.szsyk.com

Maaletooja : AL Invest OÜ, info : www.massaažitool24.ee