


TALISMAN ORION

Intelligentne massaažitool AL-7602

Kasutusjuhend

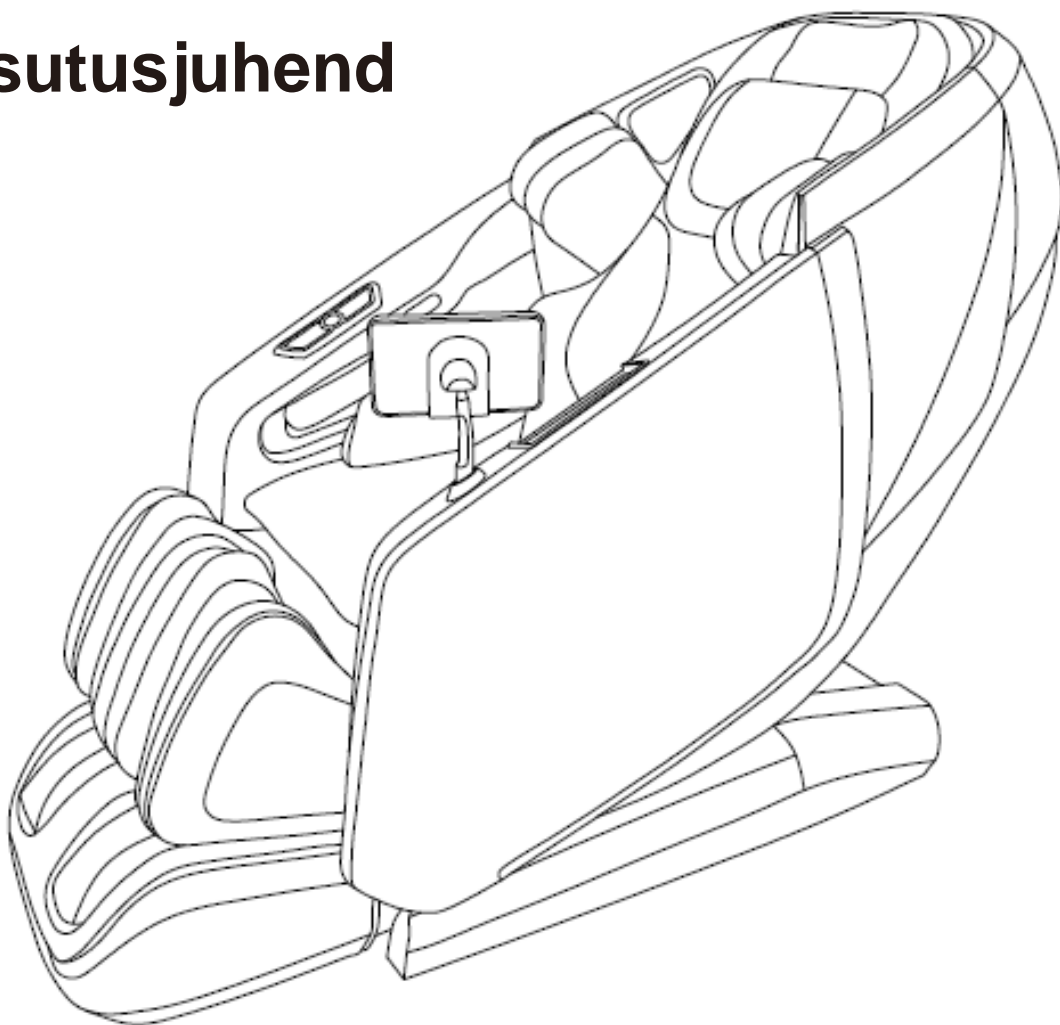

Enne tooli kasutamist lugege hoolikalt läbi OHUTUSJUHEND.

Intelligentne massaažitool

RK7602

Toimimise kirjeldus

1. Seljatugi algatab ise sujuva 4D-liikumise, millega rakendab masseerimismeetodeid, nagu sõtkumine, kloppimine, punktmassaaž, koputamine ja shiatsu. Surve tekitamine tigureduktoriga tugevdab tõhusalt õlamassaaži ja võimaldab kasutada kombineeritud sõtkumismeetodit, mis sarnaneb käsimassaažile. Nautige samasugust mugavust nagu käsimassaažil.
2. Seadmel on täiustatud puutesurveandur, mis kasutab keha tuvastamiseks ja järgimiseks patenteeritud meetodit, kehakuju kaardistamist, survetundlikku mälu, ning mis võimaldab täpset ja tugevat massaaži mitmesuguse pikkuse ja kehatüübiga inimestele.
3. Kohanev hüperboolne siin kõrvaldab istumisasendiga seotud probleemid: kaarduv hüperboolne siin teeb pikali laskumise sujuvamaks.
4. Ühe nupuga käivitata nullgravitatsiooniga tahapoole naaldumine vähendab tõhusalt lülisambale ja liigestele avalduvat survet ja võimaldab kogeda tõelise kaalutuse tunnet.
5. Ettepoole libistamisel ei vaja tool seljatagust ruumi, nii et selle saab asetada seina lähedale. See hoiab kokku kodust ruumi ja võimaldab massaaži täielikku nautimist piiratud alal.
6. Seadmel on mugavalt kasutatav 7-tolline puutepaneeliga käsijuhtseade, mis suudab reaajas näidata masseerimiskohta ja -meetodit ning olekut, ja millega saab kohandada massaažiprogrammi. Sellel on ka kiire ja lihtne juhtseade, millega saab kiiresti masseerima asuda.
7. Sääremarjarullikuga, soojendusega ja pulseeriva õhusurvega uuenduslik tehnoloogia jalalihaste masseerimiseks parandab vereringet, leevendab jalavalusid ja taastab jala elujõu.
8. Jalatugi on teleskoopiline, automaatselt reguleeritav kuni 19 cm ulatuses ja sobib eri pikkusega inimestele.
9. Jalalabade rullimine ja õhusurvega mõjutamine stimuleerib jalataldadel olevaid refleksipunkte, vabastab inimkeha meridiaanid ja nende harud, reguleerib ja taastab inimkeha elundite talitluse.
10. Käetugi teeb kogu käsivarrele pulseerivat õhusurve massaaži, mis muljub käsivart ja teeb peopesa akupunktuuri punktidele punktmassaaži, parandab vereringet ja leevendab käte tuimust. Käetoe ülemises osas on USB-pesa ja juhtmevaba laadimine, mis tagavad mobiiltelefoni aku pideva laetuse.
11. Vöökohal ja istme külgedel on mitu õhkpadjakomplekti, mis võimaldavad õhkpadjadel avaldada eri kohtades vahelduvat survet ja kõrvaldada kiiresti väsimuse.
12. Vöökohale rakendatakse hiina traditsioonilise massaaži võttena hüpertermiat, mis parandab vereringet, leevendab valusid vöökohas ja kannab hoolt põrna ja mao eest.
13. Juhtmevaba Bluetoothiga pleier parandab tõhusalt meeleolu ja leevendab vaimset väsimust.
14. Tehisintellektiga hääljuhtimissüsteem võimaldab vabastada käed ja juhtida vabalt massaaži.
15. Käetoe alumises osas on õhustikku loova pildiga LED-lamp, mis tekitab masseerimisel õdusa keskkonna.

- ✦ 1. Täname teid meie massaažitooli RK7602 ostmise eest!
- 2. Enne tooli kasutama hakkamist lugege hoolikalt ja arusaamisega läbi kasutusjuhend.
- 3. Hoidke kasutusjuhendit heas seisukorras, et saaksite seda vajaduse korral üle vaadata.
- 4. Kõige suuremat tähelepanu pöörake punktile „Ettevaatusabinõud“.

✦ Märkus. Jätame endale õiguse toodete konstruktsiooni ja selgituste muutmiseks eelneva teavitusega. Juhendis olevad pildid on esitatud üksnes viitamiseks ja võivad erineda tegelikest toodetest.



Sisukord

Ettevalmistus	Ettevaatusabinõud _____	1
	Väliskonstruktsiooni osade nimetused _____	5
	Sisekonstruktsiooni osade nimetused _____	6
	Mehaaniliste seadmeosade joonis _____	7
	Mehaaniliste seadmeosade nimekiri _____	8
Paigaldamine	Paigaldamine _____	9
Massaaži kasutamine	Massaažieelne reguleerimine _____	15
	Sisesehitatud kaugjuhtimispaneeli käsklused _____	17
	Kaugjuhtimine tahvelarvutiga _____	19
	Hääljuhtimise kasutamine _____	27
	Kasutusjuhend ja toimimist illustreerivad pildid _____	29
	Pärast massaaži _____	32
Hooldus	Puhastamine ja hooldus _____	33
Muud	Tõrgete kõrvaldamise juhend _____	34
	Tehnilised andmed _____	35





Hoidke kasutusjuhendit kättesaadavas kohas, et saaksite seda igal ajal kasutada

Ettevaatusabinõud



- ✦ Palun lugege juhend enne kasutamist hoolikalt läbi, paigaldage seade ja kasutage seda vastavalt juhendi nõuetele.
 - ✦ Ettevaatusabinõud on ette nähtud ohu ning kahjustuste ulatuse ja tõsiduse selgitamiseks. Valest kasutamisest ja valedest eeldustest tulenevad olukorrad võib jagada kaheks: [Hoiatus!] ja [Ettevaatust!].
- Mõlemad on olulised ohutushoiatused, palun pöörake neile tähelepanu.

 Hoiatus!	See tähis hoiatab kehavigastuse tekkimise või surma eest.
 Ettevaatust!	See tähis hoiatab võimaliku vigastuse või kahjustuse eest.

Tähiste tähendus

	See tähis osutab keelatud käitumisele.		See tähis tähendab, et seadet ei tohi ise lahti võtta.
	See tähis tähendab, et tuleb järgida juhiseid.		See tähis näitab, kuidas kasutada toitejuhet õigesti.

- ✦ Pärast alljärgneva läbilugemist hoidke seda igal ajal kättesaadavana.

 Hoiatus!	
	<ul style="list-style-type: none"> • Osteoporoosi, lülisambamurdude ja valu tekitavate ägedate haiguste (nt nihestuste või lihaspinge) all kannatavad patsiendid. • Südamehaiged (sh rütmurite või muude meditsiiniliste elektroonikaseadmete kasutajad). Pahaloomuliste kasvajatega patsiendid. Isikud, kellel on diabeedist või muudest perifeerse vereringe häiretest tingitud tajuhäired. • Ebanormaalse või kõverdunud lülisambaga isikud. • Lülivaheketta songaga isikud. • Rasedad, äsjasünnitanud ja halva tervisega inimesed. • Mitmesuguste traumade, tromboosi, ägedate veresoonte kasvajate, mitmesuguste nahapõletike jne all kannatavad inimesed. • Inimesed, kellel on kadunud temperatuuritaju. • Kõrge palaviku nähtudega (äge põletik, väsimus, külmavärinad, vererõhu muutused, füüsiline nõrkus) inimesed. • Üle 80-aastased eakad. • Seadet ei tohi kasutada vaimse puudega inimesed ega need, kes ei ole võimelised seadmega töötama. • Seadet ei tohi kasutada inimesed, kes ei suuda enese eest hoolitseda, väikelapsed ja joobes isikud. • Kui seade või seda kasutavad inimesed on märjad, ei tohi seadet kasutada. • Ilma kuumatundlikkuseta või allergilised inimesed peavad seadme kasutamisel olema ettevaatlikud või selle kasutamist vältima. • Ärge jääge toolis magama. <p>Ülaltoodud sümptomitega inimesed ei tohi seadet kasutada või peavad enne selle kasutamist konsulteerima arstiga. Kui tegemist on kasutatud tootega, tuleb läbi viia korralik ülevaatus.</p>
	Kui seade ei sobi kasutajale, võib see põhjustada õnnetusi või tekitada füüsilisi vaevusi.



Hoiatus!

	<ul style="list-style-type: none"> • Enne toolile istumist veenduge, et seadme osade vahel pole võõrkehi. • Seljatoe või säärite tõstmisel ning sääreosa pikendamisel veenduge, et tooli ümber (taga, all või ees) ei oleks inimesi ega esemeid. • Kui kasutamise ajal esineb kõrvalekaldeid, lõpetage kohe kasutamine ja pöörduge arsti poole. • Pea ümbruse masseerimisel pöörake tähelepanu massaažipea liikumisele, ärge masseerige pead liiga palju. • Kaela ümbruse masseerimisel olge eriti ettevaatlik ja vältige kaela liiga tugevat masseerimist. • Ärge kasutage seadet kõhu või põlvede masseerimiseks. • Kui soovite massaaži ajal toolist lahkuda, tuleb massaažitool enne lahkumist peatada. • Ärge kasutage samal ajal muid seadmeid. • Lapsed või lemmikloomad ei tohi mängida tooli peal ega selle ümbruses (eriti kasutamise ajal); ärge istuge ega seiske selja-, käe- või jalatugedel. • Kui seadet kasutavad piiratud liikuvusega või suhtlemisoskuseta inimesed, tuleb nende eest tähelepanelikult ja pidevalt hoolt kanda. • Enne seadme teisaldamist tuleb seljatugi ja jalatoed viia tagasi algse nurga alla. 	<p>Õnnetused ja vigastused</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Seadme paigaldamisel lülitage toitelüliti pärast tooli algasendisse viimist välja ja eemaldage pistikupesast pistik. • Seadme pistikut tohib ühendada vaid sobiva pistikupesaga. Lühise- või tulekahjuohtu vähendamiseks lükake pistik kogu ulatuses pesasse. • Kui seadet ei kasutata, eemaldage pistik pesast. Enne pistiku pesast eemaldamist lülitage välja kõik massaažitoimingud ja lülitid. 	<p>Tulekahju ja elektrilöögid</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Massaažitoolil on keelatud hoida patju ja muid esemeid. • Seadme pikaajaline koormuseta töötamine on keelatud. • Seadme järelevalveta jätmine pärast toiteallikaga ühendamist on keelatud. 	<p>Õnnetusjuhtumid</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrilöögi ja lühise vältimiseks ärge kasutage seadet, kui pistik või pistikupesalaoks on loksunud. • Tulekahju, elektrilöögi või rikete vältimiseks tohib kasutada ainult nimipinget. • Toitejuhe ei tohi olla katki, ümber tehtud, väändunud, venitatud, sõlmes või raskete esemete surve all (erilist tähelepanu tuleb pöörata seadme alla jäämisele) jne. • Kui toitejuhe või -pistik on katki või ei tööta korralikult, ei tohi toodet kasutada. • Hoidke toitejuhet eemal soojusallikatest. 	<p>Tulekahju ja elektrilöögid</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Kui seade ei tööta korralikult, on maha kukkunud või kahjustunud, on veega üle pritsitud või vette kukkunud, peavad seda parandama spetsialistid või tuleb see saata selleks ettenähtud remondikeskusesse. Seadet ei tohi ise muuta, lahti võtta ega parandada. • Kui toitejuhe on katki, tuleb selle asendamiseks kasutada ettenähtud toitejuhet või osta eriotstarbelised seadmeosad tootjalt või teeninduskeskusest. • Elektrilöögi ja traumade vältimiseks ärge avage ega võtke seadet lahti ilma loata. Seadmes ei ole kasutaja hooldatavaid osi. • Enne kasutamist tõstke seljatoe padi üles ja kontrollige, et seljatoe nahk ega riie poleks katki. Kahjustuste (ükskõik kui väikeste) esinemise korral lõpetage kohe seadme kasutamine ja eemaldage pistik pesast. Kutsuge parandaja. 	<p>Lahtivõtmine ja parandamine</p>



Ettevaatust!

Ettevalmistus

	<ul style="list-style-type: none"> Kasutage seadet tasasel pinnal. 	Juhusliku ümberkukkumise vältimiseks.
	<ul style="list-style-type: none"> Alustage kerge massaažiga. Soovitatav kasutamise kestus on 20 minutit, samas asendis tohib masseerida 5 minutit. 	Pikaajaline pidev kasutamine mõjub kahjulikult.
	<ul style="list-style-type: none"> Enne aeglaselt toolile istumist veenduge, et massaažipea on õiges asendis. Tahvelarvuti käsijuhkseadme muljumise või mahakukkumise vältimiseks paigutage need õigel ajal tahvelarvuti toele ja ärge jätke juhuslikesse kohtadesse. 	Juhuslike kahjustuste vältimiseks.
	<ul style="list-style-type: none"> Enne pistikupesaga ühendamist veenduge, et toitelüliti on välja lülitatud. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Kui seadet ei kasutata, lülitage kõik massaažitoimingud ja lülitage enne pistiku pesast eemaldamist välja. 	Vastasel juhul võib voolu tagasitulek põhjustada õnnetusi.
	<ul style="list-style-type: none"> Veenduge, et toitepistik on täielikult pesas. 	Lühise- ja tulekahjuohtu vähendamiseks.
	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, et toitejuhe ei oleks katki. Pistik ei tohi olla märg ega määrdu. Ohutuse tagamiseks paigaldage maandusjuhe õigesti. Pistik tuleb ühendada maandusjuhtmega pesasse. Maandusklemmi ei tohi painutada ega ära murda. 	Selle nõude eiramisel võib lekke või tõrke tagajärjel saada elektrilöögi.
	<ul style="list-style-type: none"> Ärge vajutage massaažipäid käte ega jalgadega ning ärge astuge neile peale. Ärge pange käsi töötavate massaažipeade vahele. Ärge pange käsi ega jalgu liikuvate mehhanismide vahele. Ärge laske esemetel kukkuda ega kiiluda seadme piludesse. Selja-, käe- või jalatoel ei tohi istuda, seista ega nendele midagi panna. Ärge seiske seadme kasutamise ajal selle peal. Ärge eemaldage kasutamise ajal pesast pistikut ega lülitage välja toitelüliti. Ärge pange käsi ega pead sääremarjade masseerimise alasse või selle alla. Peas ei tohi olla kõvu juuksearvukuid. Tuharate ja reite masseerimisel ei tohi püksitaskutes olla kõvu esemeid. Käetoel välimuse kahjustamise vältimiseks ärge minge selle vastu kõvade või teravate esemetega. Kui massaažitooli seljatugi on kallutatud asendis, ei tohi sellel istuda ega seda tugevalt vajutada. Ärge kasutage tooli alasti või kui teil on seljas ainult õhukesed riided. Ehkki õhukesed riided võivad massaaži mõju suurendada, võivad need põhjustada nahaärritust, valu või madalatemperatuurilisi põletusi. Toodet ei tohi kasutada kohe pärast sööki, sest see võib tekitada füüsilisi vaevusi. Ärge kasutage seadet, kui kannate avaraid rõivaid või rippuvaid ehteid. Hoidke pikki juukseid massaažiseadmest eemal. 	Juukset tuleb hoida massaažiseadmest eemal.
	<ul style="list-style-type: none"> Hoidke seade eemal kuumusest, niiskusest, teravatest esemetest ning korrodeerivatest, tuleohtlikest ja plahvatusohtlikest keskkondadest. Seadme peale on keelatud panna soojendavaid esemeid, nt elektritekke. 	Vastasel juhul võib riie pleekida, muuta värvi või kõveneda ning lagundada kunstnaha.
	<ul style="list-style-type: none"> Ärge paigutage seadet ahju või kütteseadmete (nt radiaatorite) lähedusse. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte või kohta, kus temperatuur on kõrgem kui 40 °C. Ärge paigutage seadet väga tolmusesse või söövitavat gaasi sisaldavasse keskkonda. Ärge paigutage seadet väiksesse ruumi ega kasutage halva õhuringlusega kohas. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Ärge kasutage seadet õues. 	



Ettevaatust!


	<ul style="list-style-type: none"> • Hoidke toodet kuivana ja ärge kasutage ega hoidke seda ujumisbasseini juures, vannitoas ega muudes väga niisketes kohtades. • Toolile ega juhtseadmele ei tohi pritsida vett. • Ärge kasutage toodet, kui keha on märg. 	Lekke või elektrilöögi vältimiseks.
	<ul style="list-style-type: none"> • Veenduge maandusjuhtme õiges paigaldamises. (Vale maandus võib põhjustada elektrilöögi. Kui teil on kahtlusi seadme maandamise õigsuses, pöörduge kontrolliks kvalifitseeritud elektrikri poole.) • Ärge kasutage pistikuadaptereid. (Kui seadme pistik ei sobi pistikupesaga, ei tohi pistikut kohandada, vaid tuleb lasta elektrikul paigaldada sobiv pistikupes.) 	Elektrilöögi vältimiseks.
	<ul style="list-style-type: none"> • Enne seadme puhastamist võtke toitepistik pesast välja. Pärast seadme kasutamist eemaldage toitepistik pesast. • Voolukatkestuse korral eemaldage seade kohe vooluvõrgust. • Tõmmake pistik pesast välja pistikust hoides. Pistiku eemaldamisel ei tohi tõmmata juhtmet. • Pärast iga massaaži lülitage toitelüliti välja ja eemaldage pistik pesast. 	Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks.
	<ul style="list-style-type: none"> • Voolukatkestuse korral eemaldage seade kohe vooluvõrgust. 	Õnnetuste vältimiseks.
		Vastasel juhul võib voolu tagasitulek põhjustada õnnetuse või vigastuse.

Maandamisjuhend

- ✦ Seadmel on maandatud pistikuga kaabel. Pistik tuleb ühendada korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupesaga, mis vastab pistiku nõuetele.

Sulavkaitsme asendamine

- ✦ Sulavkaitsme läbipõlemise korral tõmmake kõigepealt välja toitepistik ja lülitage välja toitelüliti. Seejärel avage kruvikeerajaga lülituskarbil olev kaitsmekarbi kate, vahetage kaitse välja samasuguse vastu ning pange kaitsmekarbi kate tagasi. Asendamise võib usaldada ka elektrikule.

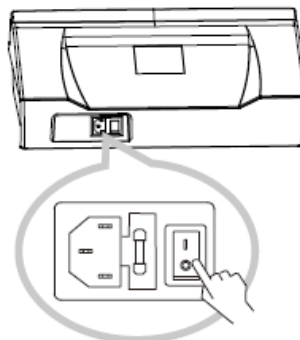


Kohad, kuhu ei tohi paigutada maandusjuhet.

Gaasitoru: võib tekkida plahvatus või tulekahju.


Telefoniliinid ja piksevardad: välg võib põhjustada elektrilöögi ja tulekahju.

Veetoru: maandusjuhe ei tööta, kui veetoru sisaldab plasti.


Väliskonstruktsioon

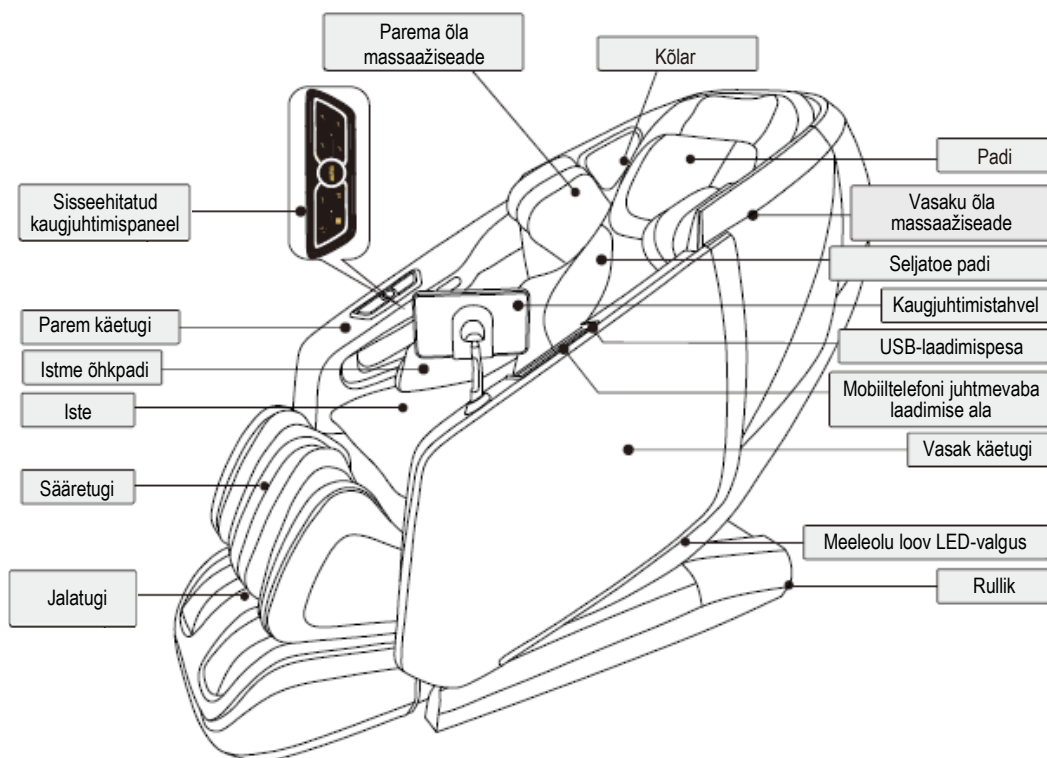


Ettevalmistus

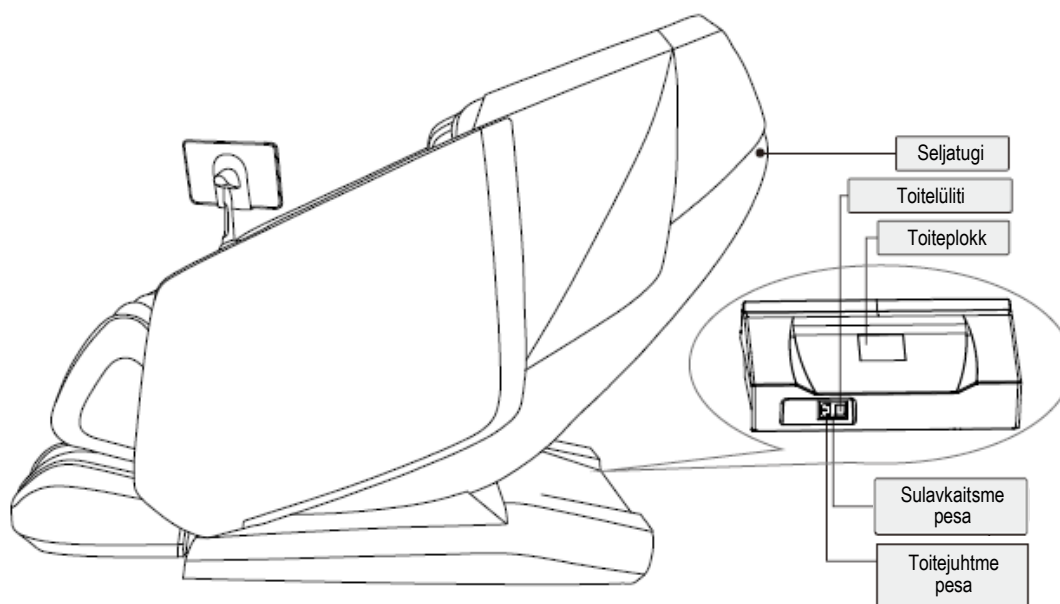

Sisekonstruktsioon

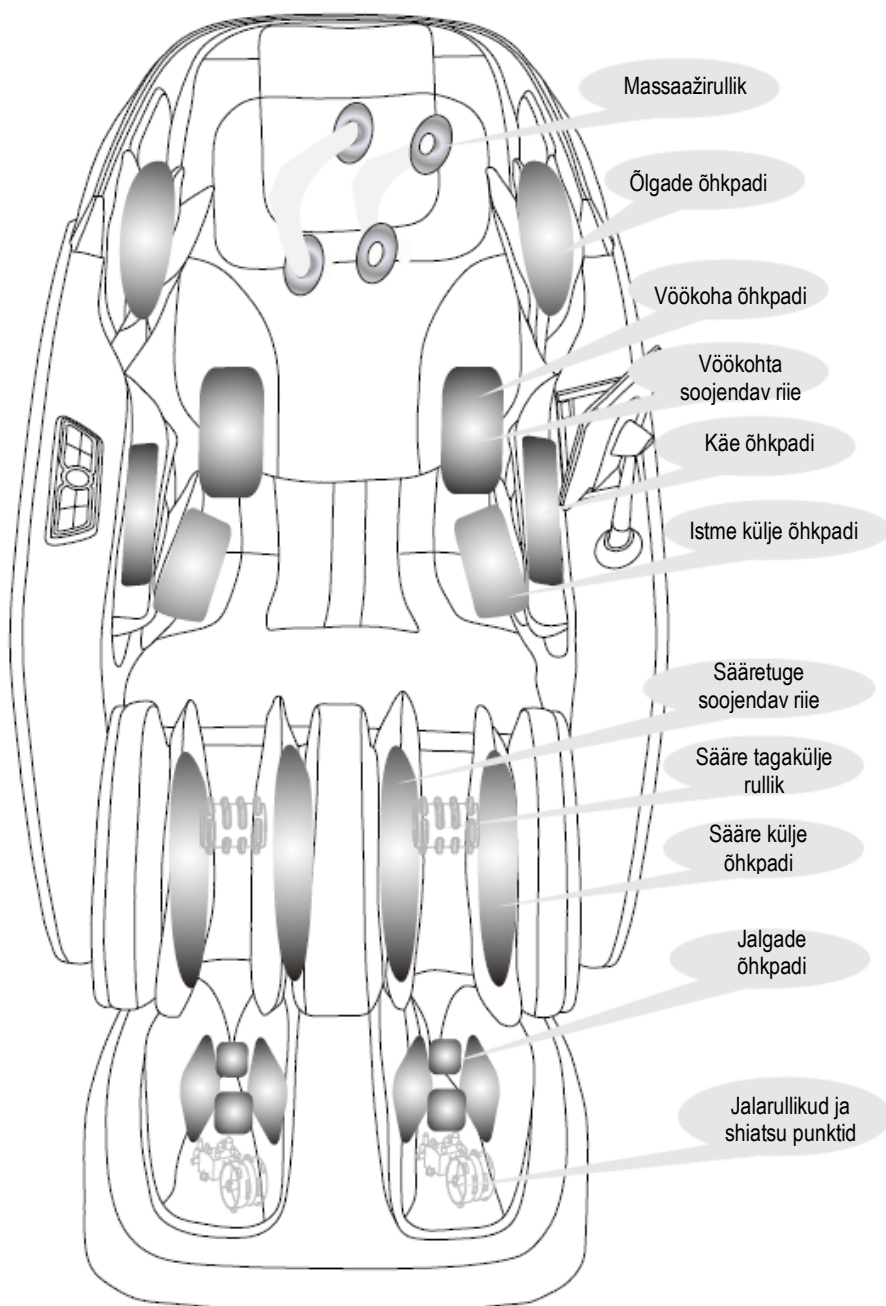

Mehaaniline koostejoonis

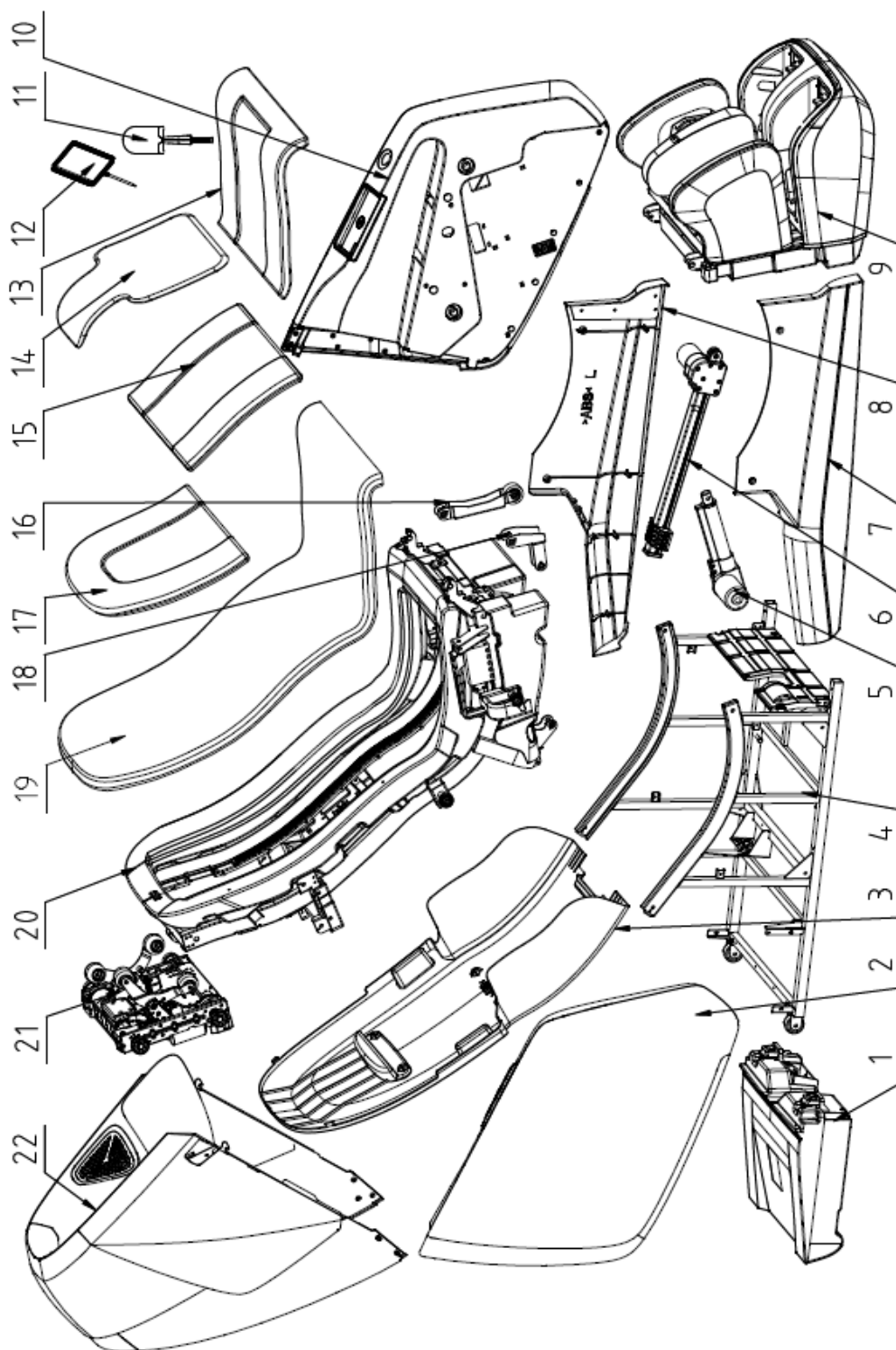

Ettevalmistus

Mehaaniliste seadmeosade nimekiri


NR	NIMETUS	KOGUS	NR	NIMETUS	KOGUS
1	Toiteploki koost	1	22	Õlaosa koost	1
2	Parema käetoet koost	1			
3	Seljatoe kate	1			
4	Istmeraami koost	1			
5	Sääretoe ajam	1			
6	Istme ajam	1			
7	Parem tiib	1			
8	Vasak tiib	1			
9	Sääretoe koost	1			
10	Vasaku käetoet koost	1			
11	Tahvelarvuti kanduri koost	1			
12	Kaugjuhtimistahvel	1			
13	Istmepadi	1			
14	Padi	1			
15	Seljatoe padi	1			
16	Sääretoe ajam	1			
17	Õlapadi	1			
18	Ajami mitmeosalise aasaga osa	1			
19	Seljatoe padi	1			
20	Seljatoe koost	1			
21	Massaažimehhanism	1			

Paigaldamine 1

1. etapp. Eemaldage pakendikarbid jalatugi, põhikorpus ja tarvikud.


- ① Hoidke sääre- ja jalatugesid paremalt ja vasakult küljelt mõlema käega ning tõstke sääre- ja jalatoed istme põhikorpusest välja.

Sääretugi

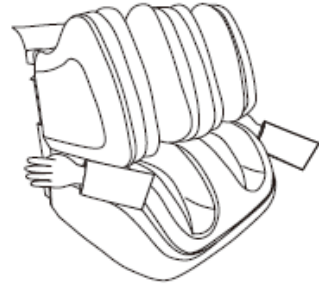

- ② Võtke välja karp tarvikutega ja muud osad ning tõstke rohkem kui kahe inimesega massaažitooli korpus välja.
- ③ Kontrollige ja veenduge, et kõik detailid on olemas (kontrollige üksikshaaval pakkenimekirja järgi).

Massaažitooli põhikorpus

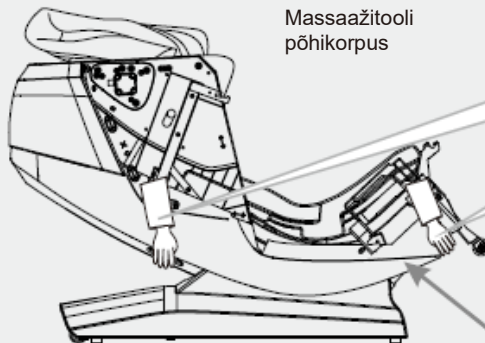

Üks inimene hoiab mõlema käega seljatoe käepidemest ja teine inimene hoiab mõlema käega seljatoe alumisest osast ning tõstavad selle aeglaselt välja.


Märkus. Sellest kohast liigutamine on keelatud



Tahvelarvuti



Tahvelarvuti kandur

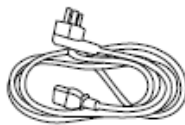

Toitejuhe




Vasak õlakate



Parem õlakate

- ③ Tõstke vasak- ja parempoolne käetugi välja ja pange lapiti lauale või põrandale. (Vältige kriimustamist.)

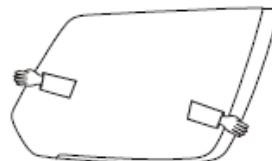

Vasak käetugi




Parem käetugi

Paigaldamine 2

● Leidke paigalduskoht.

- Veenduge, et saate seadet kallutada.

Jätke tooli ja seinavahele vähemalt 50 cm

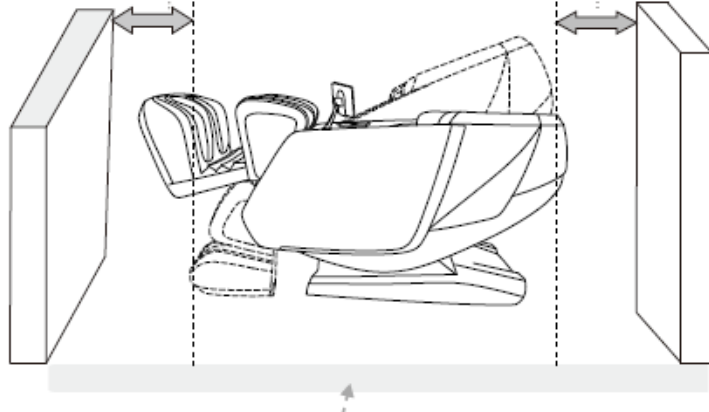

Vähemalt 2 cm seinast eemal

Korpuse all põrandal olev pehmendus, näiteks padi

Näpunäide.

Põranda kahjustamise vältimiseks on soovitatav panna korpuse alla padi vms. Põrandale asetamisel tuleb sinna panna matt, mis katab korpuse all oleva põranda.


Tähelepanu!

- Ärge kasutage ega hoidke toodet ujumisbasseini juures, vannitoas ega muudes väga niisketes kohtades.
 - Lekke, elektrilöögi või rikke vältimiseks.
- Kasutage tasasel pinnal.
 - Vältige seadme juhuslikku ümberkukkumist.
- Ärge paigutage seadet ahju, radiaatorite ja muude kütteseadmete lähedale.
 - See võib põhjustada riide pleekimist, värvimuutust või kunstnaha kõvenemist, lagunemist jne.

Paigaldamine 3

2. etapp. Lähtestage massaažitool.


① Ühendage kaabli üks ots toiteploki pesaga ja teine pistikupesaga ning lülitage sisse toitelüliti: massaažitool on nüüd sisse lülitatud. ② Asetage kaugjuhtimispaneeli pistiku soon kohakuti kaugjuhtimispaneeli pistikupesaga tooli vasakul küljel, lükake lõpuni sisse ja keerake mutter kõvasti kinni. ③ Lülitage kaugjuhtimiseks ettenähtud tahvelarvuti toitenupust sisse ja seejärel välja: nüüd tõuseb seljatugi üles ja iste liigub alla. Pange kaugjuhtimispuhastus pärast seljatoe lähteasendisse viimist ajutiselt istmele. ④ Pärast seljatoe lähteasendisse viimist lülitage toitelüliti välja ja eemaldage pistik pesast.

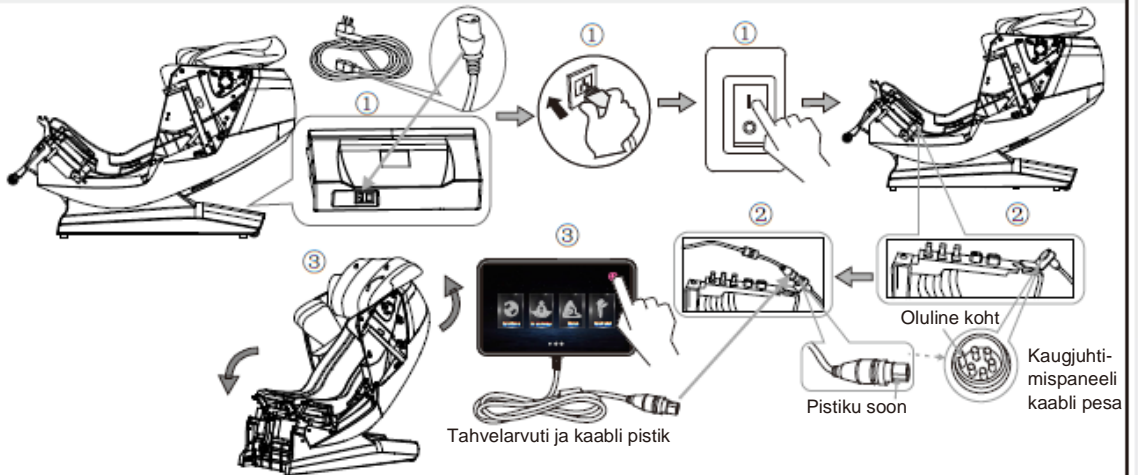**3. etapp. Vasaku ja parema õlakatte paigaldamine**

Pange parem õlakatte väljastpoolt tooli õlakoha lähedale.

② Sisestage õlakatte 6 lukustusava ja 3 lukku 6 lukustuseendi ja 3 lukku sisse väljastpoolt tooli õlaosa. Samal ajal tõmmake juhtmekimp õlakatte seest selles oleva sälgu kaudu välja. Selleks et lukud jääksid kindlalt kinni, lükake õlakatet kõvasti sissepoole.

③ Paigaldage samamoodi vasak õlakatte (puudub juhtmekimp)

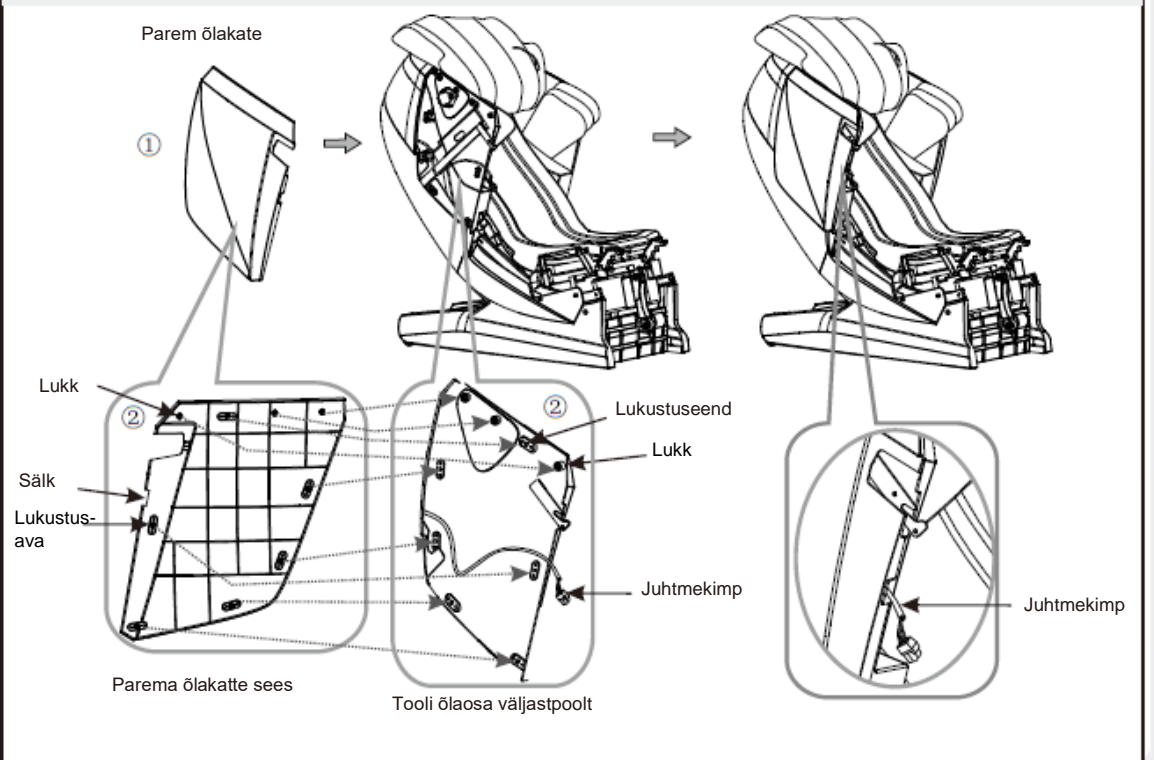


Paigaldamine 4

4. etapp. Vasak- ja parempoolse käetoe paigaldamine

① Keerake kaks M6x20 kruvi istme mõlema külje raudraami esiosa sisse. ② Pange parem käetugi seadme põhiosa külje lähedale ja ühendage tooli õlaosa juhtmekimp juhtmekimbu pistikupesaga, mis on tooli õlaosa küljel. ③ Lükake käetoe otsas olev fikseeritud telg üleval õlaosa sees olevasse kinnituspilusse. Sisestage üleval õlaosa sees olevasse fikseeritud avasse piiraja. ④ Lükake käetoe alumises osas olevad kinnitused istmeraami küljel olevasse kinnituspilusse. ⑤ Sisestage käetoe õhuvoolik kindlalt istme õhuventiili külge ja lükake juhtmekimp kindlalt sisse. ⑥ Suunake käetoe küljel olev fikseeritud plaat istmeraami küljel olevasse fikseeritud platvormi, seejärel keerake üks M6x20 kruvi ja suur vahetihend ristpeaga kruvikeerajaga kindlalt kinni. ⑦ Paigaldage vasak käetugi, järgides ülaltoodud etappe. Vasakus käetoos ei ole juhtmekimpu.



Märkus. Ärge muljuge paigaldamise ajal õhuvoolikut. Muljumine võib põhjustada õhulekkeid või ei lase õhkpatja täis puhuda. Veenduge, et kinnitusplaat ja juhtmekimp on korralikult ühendatud, vastasel juhul kukub käetugi küljest või mugav käsijuhtseade, kõlar ja Bluetooth ei hakka tööle.

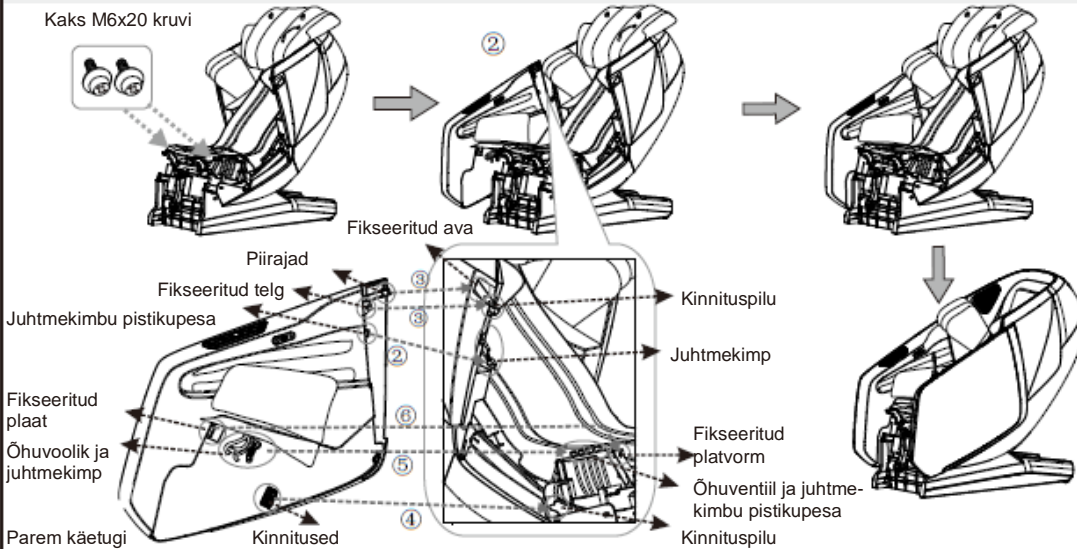


5. etapp. Sääre- ja jalatugede paigaldamine.

① Keerake kinni sääre- ja jalatugede riputusaasad. ② Pange juhtmekimbu pistik pesasse. ③ Ühendage sääretoe õhuvoolik kindlalt seadme põhikorpuse õhuotsakuga. ④ Tõstke üles riputusaasa ülemise pöördvõlli surveplaat, tõstke sääre- ja jalatoed üles, pange pöördvõlli põhikorpuse riputusaasa sisse ja lükake pöördvõlli surveplaat alla. ⑤ Keerake kruvi kinni.




Märkus. Õhuvooliku ja juhtmekimbu ühenduste tegemisel ei tohi need kokku põimuda.

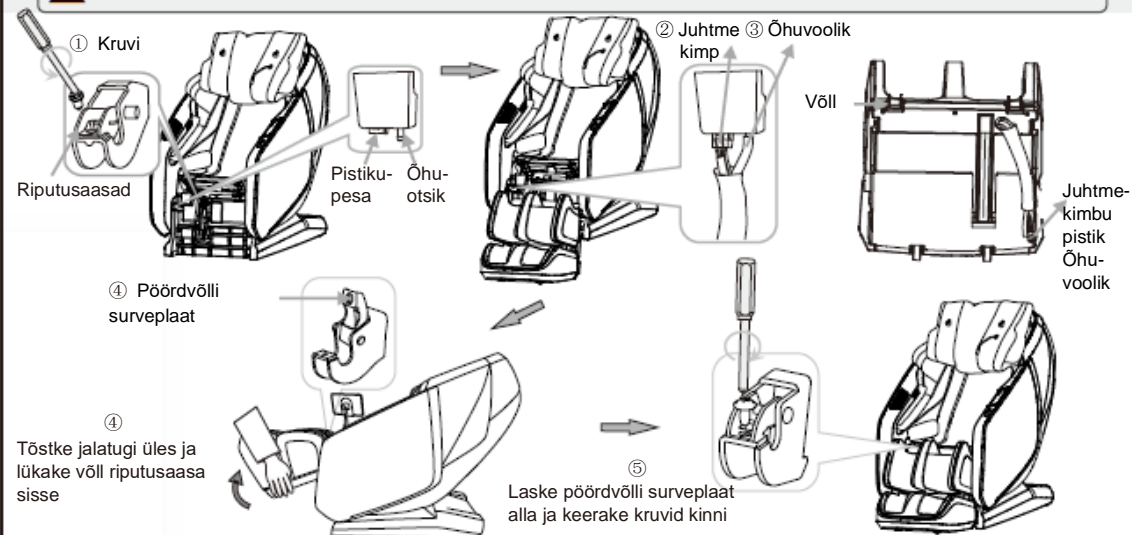

Paigaldamine 5

6. etapp. Tahvelarvuti ja käsijuhitseadme kanduri paigaldamine

- ① Sisestage kandurplaadi varras vasaku käetoe kanduripesasse. Lükake seda vastavalt kanduri ja pesa ava kujule, kuni kanduri põhjakruvi läheb oma kohale.
- ② Pange juhttahvel kandurisse.

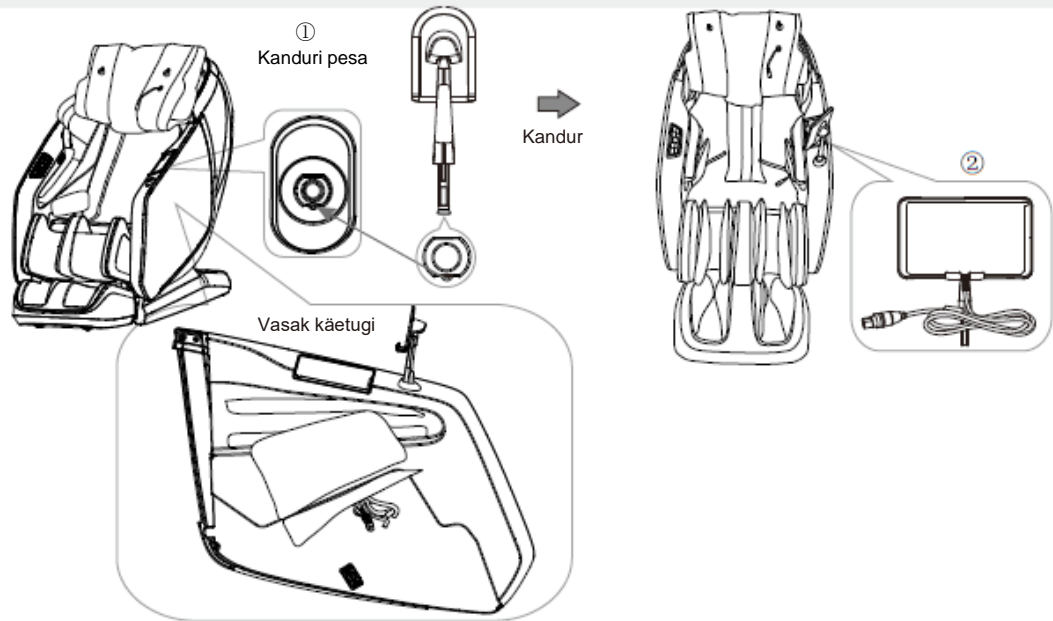


7. etapp. Ühendage õhuvooliku küttekaabliga ja paigaldage seljatoe padi.

Ühendage istmeosa ja vöökohta õhkpadja õhuvoolik, ühendage vöökohta küttekaabel ja viimaks tõmmake kinni seljatoe padja tõmblukk.

★ Näpunäide

Kui inimene istub toolil ja padja allosa on kõrvaga samal kõrgusel, on padi kokkupuutes kuklaga. Sellisel juhul tuvastatakse keha kuju täpsemini ja masseerimine on mugav.

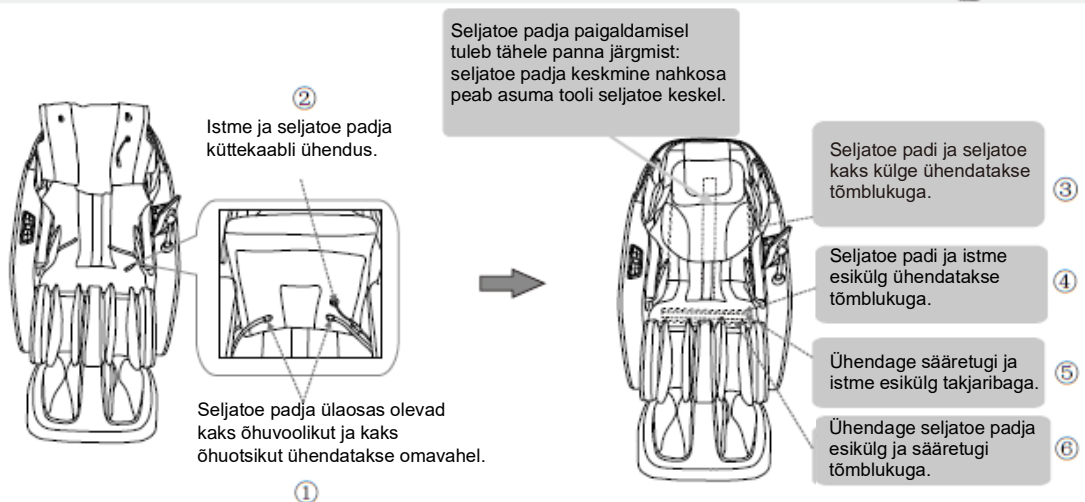

Paigaldamine 6

8. etapp. Toimingud pärast paigaldamist.



- 1 Pange toitepistik seljatoe all oleva toiteploki pistikupesasse (pilt).
- 2 Sisestage toitejuhtme teine toitepistik pistikupesasse.
- 3 Lülitage sisse toiteploki tagaküljel olev toitelüliti.
- 4 (Toitelüliti „O/I“, ühendamiseks vajutage „I“.) Massaažifunktsiooni valimiseks kasutage käsijuhthet või tahvelarvutit. Nautige toote pakutavat lõdvestavat ja mugavat massaaži.



Enne toitepistiku ühendamist pistikupesaga veenduge, et toitelüliti on väljalülitusasendis.



Ühendage toitejuht toiteploki pistikupesaga.

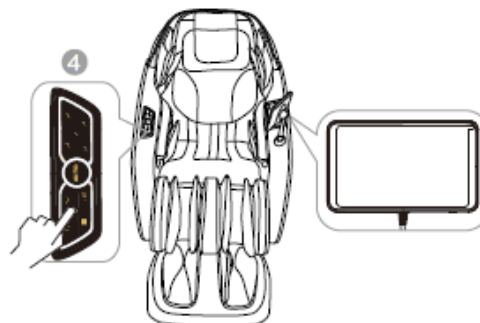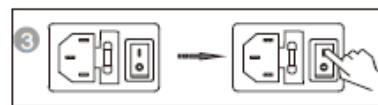

Keskond



Ettevaatust!



Lekke või elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage tooli märjas keskkonnas, näiteks ujumisbasseini või vannitoa lähedal.




Polstri lagunemise vältimiseks ärge kasutage päikese käes ega ahju või muu soojusallika lähedal.



Tooli ümberkukkumise, müra tekke või muu ootamatu tõrke vältimiseks kasutage tooli tasasel pinnal.

● Kontrollige üle tooli ette jäävad kohad.


Veenduge, et selja- või sääretoe ette liigutamisel ei jää selle ette inimesi, loomi ega esemeid.

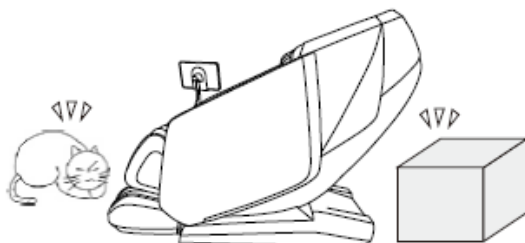

● Kontrollige toitekaablit ja pistikut.

- (1) Puhastage pistik õigeaegselt tolmust (kuiva lapiga).


Ärge kahjustage, kohandage, väänake, venitage, siduge toitekaablit ega jätke raskete asjade (eriti tooli) alla.

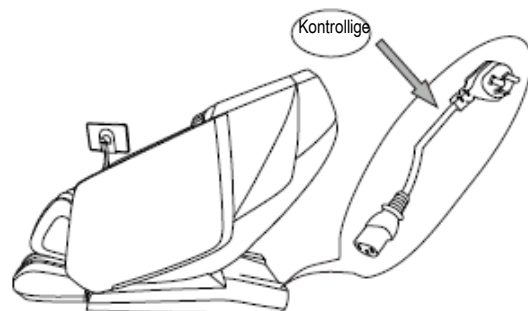

Keskonna kontrollimine

● Ruumi suurus tooli kasutamisel

- Vahetult seinajuures.
Näpunäited: vähemalt 2 cm seinast.


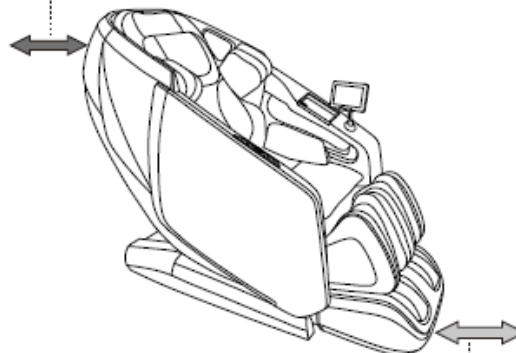


- Vähemalt 50 cm sääretugede ees:

● Kontrollige ümbruskontrollimine.

Seljatoe või sääretoe taha või ette liigutamisel pöörake tähelepanu järgmisele.

- (1) Veenduge, et üheski suunas ei ole inimesi ega asju.
- (2) Kontrollige ruumi suurust.

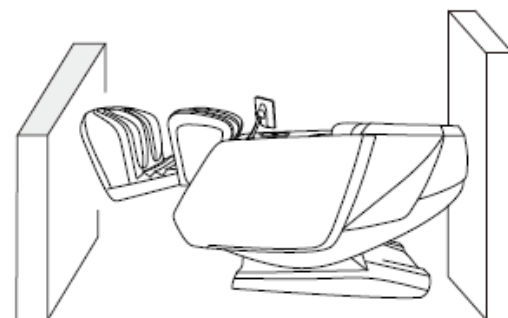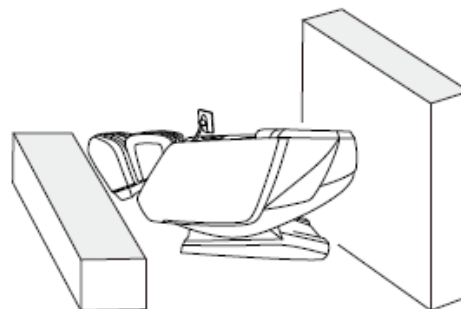

Tools liigutamine



Ettevaatust!

- ✦ Õnnetuste ja kahjustuste vältimiseks ärge liigutage töötavat tooli.


Teisaldamine

- ✦ Kahjustuste vältimiseks liigutamisel siduge kaablid kokku ja pange istme sisse.
- ✦ Kui tool pörkab millegi vastu, võib see kahjustada tooli sisemisi osi.
- ✦ Kui põrand on valmistatud puidust või muust kergesti kahjustatavast materjalist, ärge kasutage rullikut. Tooli peab tõstma vähemalt kaks inimest.
- ✦ Veenduge, et toide on välja lülitatud ja pistik ei puuduta põrandat. (On parem, kui tool on püstasendis: nii ei lähe seljatugi vastu põrandat.)



Tavaolukord

- 1 Vajutage peats alla, nii et raskus langeb tagumistele rullikutele. Seejärel lükake tool sujuvalt sihtkohta ja asetage aeglaselt maha.

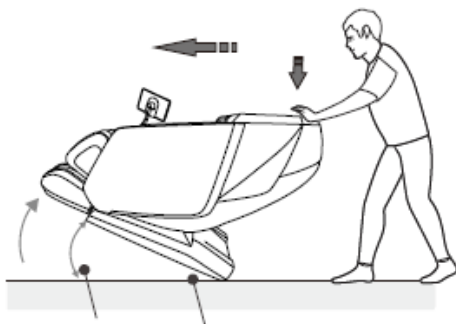

Mitte rohkem kui 40° Rullik




Tools liigutamisel hoidke jalatuge nii, nagu on näidatud pildil, siis ei teki nahkmaterjalile kriimustusi.

Massaažitooli seljatoe liigutamise ajal ei saa käetuge liigutada.

Massaažieelne reguleerimine

● Enne reguleerimist

- ✦ Enne aeglaselt toolile istumist veenduge, et massaažipea on õiges asendis.

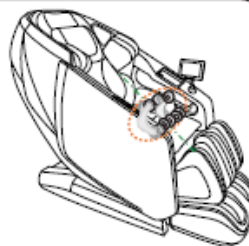

- ✦ Vältige massaažipea valest asendist tingitud vigastusi.

- ✦ Akupunktuuri punkti impulsi asukoha tuvastamine ja kinnitamine
Kui massaažipea ei suuda akupunktuuri punkti impulsi asukoha tuvastamisel seda leida, peaks ölad asuma seljatoe keskjoonel.




Õige asend: selg peab olema vastu tooli seljatuge, pea tuleb asetada seljatoe padjale.

Akupunktuuri punkti impulsi asukoha automaatse tuvastamise korral annab käsijuhitseade sellest märku.

Kui ölgade kõrgust tuleb reguleerida, ilmub käsijuhitseadmele märguanne „Ölgade kõrguse reguleerimine“. Ölgade kõrgust saab kohandada liidesel olevate üles ja alla näitavate noolte kohaselt.


Vältige massaažipea kasutamist olukorras, kus akupunktuuri punkti impulsi asukoht pole täpselt määratud, sest see halvendab masseerimismugavust.

● Näpunäide

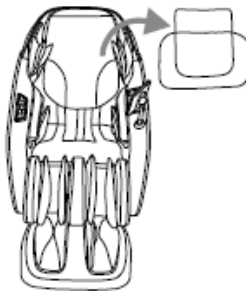


- Kui on tunda, et massaaž pole piisavalt tugev, eemaldage enne massaaži padi ja ölapadjad.

- Kuna tool on raske, võib see pikaajalisel kasutamisel kahjustada põrandat. Põranda kaitsmiseks pange tooli alla tekk või mõni muu pehme kate.

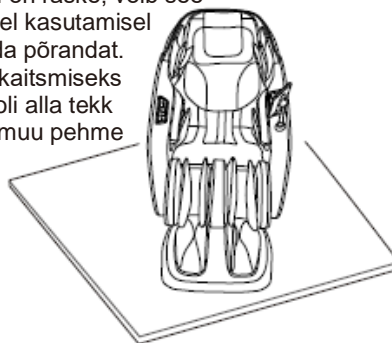

Sisseehitatud kaugjuhtimispaneeli käsklused

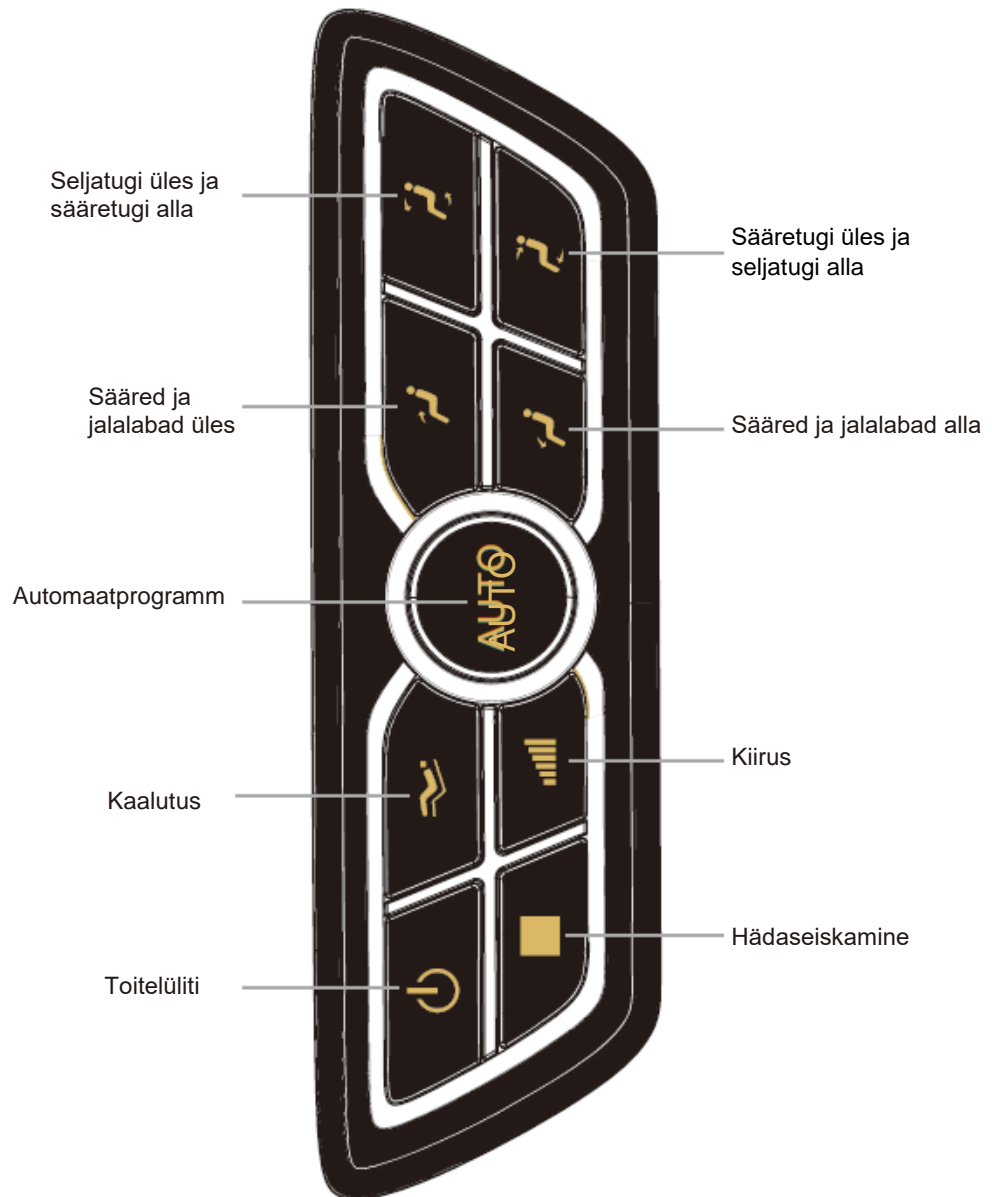

Näpunäited: kui on aktiveeritud järgmised funktsioonid, kuvavad tahvelarvuti ja käsijuhtseade olekut sünkroonselt.



1. Ooterežiimis vajutage sisselülitusnupp umbes kolmeks sekundiks alla ja massaažitool läheb alglaadimisolekusse. Kui massaažitool tuleb alglaadimisolekus välja lülitada, vajutage massaažitooli algasendisse viimiseks toitelüliti umbes kolmeks sekundiks alla. Kui on tegemist hädaseiskamisolukorraga, veenduge ohutuses ja lülitage massaažitool toitelülitist välja.



2. Vajutage seda nuppu, et reguleerida massaažitooli asendit 1. taseme kaalutuse, 2. taseme kaalutuse ja 3. taseme kaalutuse peale. Juhtseadme liidesel kuvatakse vastav kaalutuse ikoon. Kaalutuse korral null. Põleb raskusjõu indikaator.



3. Käimasoleva toimingu peatamiseks vajutage sellele nupule ning toiteindikaator ja hädaseiskamisindikaator hakkavad alglaadimist näidates vilkuma. Väljalülitamiseks vajutage toitenuppu, muud nupud ei toimi.



4. Käsijuhtimise korral vajutage seda nuppu, et reguleerida sõtkumise, kloppimise ja koputamise kiirust. Reguleeritava kiiruse tasemeid on kokku viis. Tahvelarvuti käeshoitavas liideses kuvatakse vastava kiirustaseme ikoon.



5. Alglaadimisolekus muudab juhttahvel automaatprogrammi ning näitab vastavat märgutuld ja kuva. Saadaval on viis automaatset massaažiprotseduuri: hiina traditsiooniline massaaž tervise säilitamiseks, valu harmooniline leevendamine, lihaste ja luude venitamine, eakate tervise hoidmine, kiire lõdvestus. Automaatse massaažiprogrammi esmakordsel käivitamisel pärast seadme käivitamist määratakse automaatselt õlgade kõrgus ja kuvatakse see. Vt juhttahvli juhendit.



6. Selle nupu all hoidmisel alglaadimisolekus tõusevad sääred üles. Nupu vabastamisel jäävad sääred seisma, nurk lukustatakse sellesse asendisse.



7. Selle nupu all hoidmisel alglaadimisolekus laskuvad sääred alla. Nupu vabastamisel jäävad sääred seisma, nurk lukustatakse sellesse asendisse.



8. Nupu all hoidmisel tõuseb seljatugi üles ja sääretugi laskub alla. Nupu vabastamisel jäävad seljatugi ja sääretugi seisma.



9. Nupu all hoidmisel laskub seljatugi alla ning sääretugi tõuseb üles. Nupu vabastamisel jäävad seljatugi ja sääretugi seisma.

Töötamine kaugjuhtimistahvliga


Kaugjuhtimistahvli ülemine pind

SISSE/VÄLJA nupp



Kaugjuhtimistahvel


LCD-puutekraan

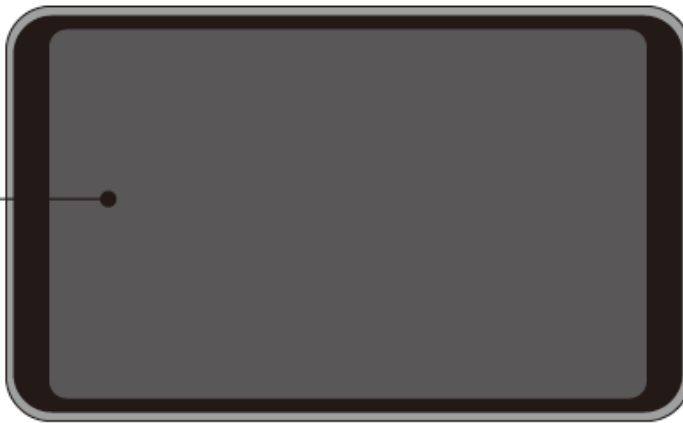

Masseerimine

1. Pärast tooli sisselülitamist läheb juhtimistahvel vaikimisi tööle ja kuvatakse algaadimiskuva. Oodake veidi aega põhikuvale minekuni ja vajutage juhtimistahvli käsijuhthadme paremas ülemises nurgas olevat toitelülitit, mis lülitab juhtimistahvli käsijuhthadme ekraani sisse või välja.

Põhikuva 1

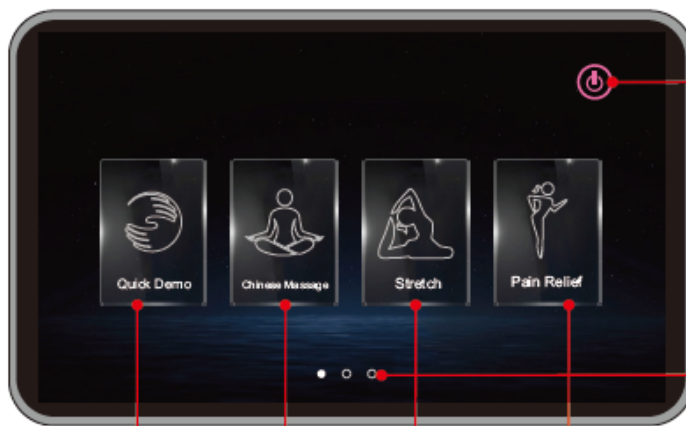

Sisse/välja

Kiirdemo

Hiina massaaž

Venitamine

Valuleevendus

Navigeerimis-
ikoonid.
Põhikuva
vahetamiseks
libistada
vasakule või
paremale.

Töötamine kaugjuhtimistahvliga



Sisselülitatud olekus viib selle ikooni vajutamine kiirdemorežiimi, vaikimisi on selle automaatprogrammi tööaeg 8 minutit.



Sisselülitatud olekus viib selle ikooni vajutamine hiina massaaži režiimi, vaikimisi on selle automaatprogrammi tööaeg 20 minutit.



Sisselülitatud olekus viib selle ikooni vajutamine venitusrežiimi, vaikimisi on selle automaatprogrammi tööaeg 20 minutit.



Sisselülitatud olekus viib selle ikooni vajutamine valuleevendusrežiimi, vaikimisi on selle automaatprogrammi tööaeg 20 minutit.

Põhikava 1

Kiirdemo, hiina massaaži, venitamise ja valuleevenduse kuva



Avalehe nupp

Akupunktuuri punktide ja lihastele avalduva mõju selgitus

Lähtestamise peatamise nupp
Sisse/välja

Paus

Asendi reguleerimine
Kellaaja reguleerimine

Soojendusnupp
4D-reguleerimisnupp

Õhusurve reguleerimise olek

Lehekülje vahetamine

Masseerimine



Nupp „Sisse/välja“, mille vajutamisel süttib ikoon, massaažitool lülitub sisse ja seda saab kasutada.



Nupp „Paus“, mis vajutamisel süttib. Kõik masseerimistoimingud peatuvad, kuval saab kasutada ainult käivitus- ja sisselülitusnupu. Normaalse masseerimise alustamiseks tuleb vajutada käivitusnupu.



Asendi reguleerimise nupp, vajutamisel minnakse asendi muutmise kuvale.



Nupp „Lähtest“ pärast töö lõppu. Seda saab sisse või välja lülitada. Sisselülitamisel läheb massaažitool pärast masseerimise lõppu lähteasendisse. Väljalülitamisel ei lähe tool lähteasendisse. Kui on aktiveeritud keskpäeva- või öörežiim, on see funktsioon vaikimisi sisse lülitatud. Kõigi muude automaatprogrammide korral on nupp punast värvi ja vaikimisi välja lülitatud.



„Avaleht“. Selle nupu vajutamisel naastakse avalehele.



Allesjäänud massaažiaja näitamise ja reguleerimise nupp. Näitab käimasolevaks massaažitoominguks allesjäänud aega, mida saab pikendada või lühendada nooltega „Üles“ või „Alla“.



Nupp „Soojendus“ süttib punaselt ja soojendus lülitub sisse, korduva vajutamise korral lülitub nupp välja.



Õhusurve reguleerimise nupp, kokku viis taset. Õhusurve reguleerimiseks tuleb vajutada pluss- või miinusemärgi. Kõige väiksema survega on 1. tase.



4D-reguleerimisnupp, kokku viis taset. Reguleerimiseks tuleb vajutada pluss- ja miinusemärgi.



Lehekülje vahetamise nupp. Vaikimisi avatakse akupunktuuri punktide kuva. Kuvatava sisu vahetamiseks klõpsake seda ikooni või nipsake inimkehal.



Inimkeha akupunktuuri punktide ja lihaste masseerimine

Töötamine kaugjuhtimistahvliga



Zero gravity1

Kaalutuse 1. taseme nupp, millele vajutamisel lülitatakse sisse kaalutuse 1. tase. Seljatugi laskub alla ja jalatugi tõuseb üles.



zero gravity2

Kaalutuse 2. taseme nupp, millele vajutamisel lülitatakse sisse kaalutuse 1. tase. Seljatugi laskub veelgi allapoole ja jalatugi jätkab ülespoole tõusmist.



Sleep

„Magamine“, millele vajutamisel süttib ikoon ja tool viiakse magamisasendisse. Seljatugi laskub alla ja jalatugi tõuseb üles.



Reset

Algasendisse viimise nupp, mille ikoon vajutamisel süttib. Tooli seljatugi tõuseb üles ja jalatugi laskub alla.

Sääretoe lühendamine

Sääretoe pikendamine

Sääretugi alla

Sääretugi üles



Seljatugi alla ja sääretugi üles

Seljatugi üles ja sääretugi alla

Töötamine kaugjuhtimistahvliga

Põhikuva 2



Sisselülitatud olekus vajutamisel süttib ikoon ja minnakse lõdvestava massaaži režiimi. Vaikimisi on tööaeg 20 minutit.



Lõdvestava massaaži kuva



Sisselülitatud olekus viib selle ikooni vajutamine erimassaaži režiimi (üksikasju vt erimassaaži kuva juhendist).



Erimassaaži kuva



Sisselülitatud olekus viib selle ikooni vajutamine käsitsi juhitate programmide kuvale (üksikasju vt käsimassaaži kuva juhendist).



Käsimassaaži kuva



Sisselülitatud olekus viib selle ikooni vajutamine personaalkeskuse kuvale (üksikasju vt personaalkeskuse kuva juhendist).



Personaalkeskuse kuva

Töötamine kaugjuhtimistahvliga

Põhikuva 2
ErimassaažNeck
Shoulder

Nupule vajutamisel sisselülitatud olekus süttib ikoon, sisse lülitatakse „Pea ja kael“.



Glutes

Nupule vajutamisel sisselülitatud olekus süttib ikoon, sisse lülitatakse „Tuharad“.



Vitality

Nupule vajutamisel sisselülitatud olekus süttib ikoon, sisse lülitatakse „Elujõud“.

Masseerimine



Senior

Nupule vajutamisel sisselülitatud olekus süttib ikoon, sisse lülitatakse „Eakas“.

Sports
Recovery

Nupule vajutamisel sisselülitatud olekus süttib ikoon, sisse lülitatakse „Spordist taastumine“.

Spine
Care

Nupule vajutamisel sisselülitatud olekus süttib ikoon, sisse lülitatakse „Seljahooldus“.




Midday

Nupule vajutamisel sisselülitatud olekus süttib ikoon, sisse lülitatakse „Keskpäev“.

Back
Waist

Nupule vajutamisel sisselülitatud olekus süttib ikoon, sisse lülitatakse „Nimmekoht“.

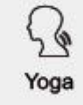

Yoga

Nupule vajutamisel sisselülitatud olekus süttib ikoon, sisse lülitatakse „Jooga“.



Morning

Nupule vajutamisel sisselülitatud olekus süttib ikoon, sisse lülitatakse „Hommik“.



Night

Nupule vajutamisel sisselülitatud olekus süttib ikoon, sisse lülitatakse „Õö“.

Põhikuva 2
Käsimassaaži kuvaKäsimassaaži
kuvamisala

Režiimi kuvamisala



Mode

Nupule vajutamisel sisselülitatud olekus süttib ikoon, kuvatakse menüü viie massaažimeetodiga (“Koputamine”, “Kloppimine”, “Sõtkumine”, “Shiatsu”, “Sõtkumine ja kloppimine”).

Töötamine kaugjuhtimistahvliga

Põhikuva 2
Käsimassaaži kuva



Käsimassaaži kuvamisala

Režiimi kuvamisala



Position

Sisselülitatud olekus vajutamisel süttib ikoon, kuvatakse valik kogu keha massaažiks, osaliseks massaažiks ja fikseeritud punktidega massaažiks. Osalise massaaži nupu vajutamisel kuvatakse üles- ja allaliikumise nupud ning kogu keha ja osalise massaaži nupud kaovad. Fikseeritud punkti massaaži nupu uuesti vajutamisel kaovad üles- ja allaliikumise nupud ning ilmuvad kogu keha ja osalise massaaži nupud.



Käsimassaaži kuvamisala

Soojenduse kuvamisala



Heating

Sisselülitatud olekus vajutamisel süttib ikoon, kuvatakse valik vöökohta soojendamiseks ja säärtede soojendamiseks. Soojendamise sisse- või väljalülitamiseks tuleb vajutada vastavat nuppu.



Käsimassaaži kuvamisala

Õhusurve massaaži piirkondade kuvamisala



Pressure

Sisselülitatud olekus vajutamisel süttib ikoon, kuvatakse õhksurvega masseeritavate piirkondade valikud „Kogu keha“, „Ülakeha“, „Vöökoht ja selg“ ning „Sääred ja jalalabad“. Vastava nupu vajutamisel saab pärast ikooni süttimist nautida õhusurve massaaži.

Masseerimine

Töötamine kaugjuhtimistahvliga

Põhikuva 2
Käsimassaaži kuva



Adjust

Selle nupu vajutamisel sisselülitatud olekus süttib ikoon ja kuvatakse mitmesugused reguleerimisnupud. Saate reguleerida masseerimiskiirust, -laiust ja -aega, 4D-d, õhusurve tugevust ja rulliku kiirust. Selja masseerimise kiirusel, õhusurvel ja 4D- on viis taset, 4D laiusel on kolm taset ja jalalabade rulliku kiirusel on kaks taset. Taseme muutmiseks tuleb vajutada pluss- ja miinusmärke.

Masseerimine

Põhikuva 2
Personaalkeskuse kuva



Personaalkeskuse kuvamisala

Režiimi kuvamisala



Language

Selle nupu vajutamisel sisselülitatud olekus süttib ikoon, kuvatakse keelemenüü, kus saab valida korea, inglise või hiina keele.



Personaalkeskuse kuvamisala

Režiimi kuvamisala



Touch sound

Sisselülitatud olekus ikooni vajutamisel see süttib ning puutehelisaab sisse või välja lülitada.

Töötamine kaugjuhtimistahvliga



Personaalkeskuse kuvamisala



Selle nupu vajutamisel sisselülitatud olekus süttib ikoon ja kuvatakse taustavaliku menüü. Tausta saab valida vasak- ja parempoolsete kolmnurksete nuppude vajutamisega.

Kehaskannimiskuva




Kui keha skannimine on lõpetatud, minnakse õlgade kõrguse käsitsi reguleerimise kuvale.

Hääljuhtimise kasutamine

Nutika hääljuhtimise kasutamine (hääljuhtimisega)

Juhtahvli toitenupu või kantava käsijuhitseadme toitenupu vajutamine ooterežiimis lülitab seadme sisse ja sel ajal läheb häältuvastussüsteem ootele.

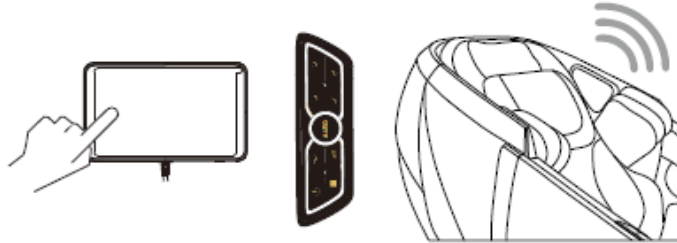

- Selleks et süsteem tunneks ära häälkäskluse, tuleb häältuvastuse kasutamisel öelda „KIRI KIRI“. Kui masseerimise lõpuni on jäänud 3 minutit ja hääljuhtimine on sisse lülitatud, lülitab süsteem selle toite automaatselt välja. Hääljuhtimise aktiveerimiseks tuleb uuesti vajutada toitenuppu. Kui massaažitool tunneb käskluse ära, antakse edukast tuvastamisest kõlarite kaudu häälega tagasisidet.

Järgmiste häälkäskluste andmiseks tuleb kasutada standardset mandariini keelt. Kui käsklusi ei tunta ära, tuleb teha kahesekundiline paus ja rääkida järgmine kord valjemini.

- Häälkäskluste andmine

Häälkäsklus
Hello, KIRI (Tere KIRI!)
Stop massage (Lõpeta massaaž)
Volume up (Suurenda helitugevust)
Volume down (Vähenda helitugevust)
Quick demo (Kiirdemo)
Change a new mode (Mine uude režiimi)
Chinese massage (Hiina massaaž)
Pain Relief mode (Valuleevendusrežiim)
Stretch mode (Venitusrežiim)
Neck Shoulder mode (Kaela ja õlgade režiim)
Glutes mode (Tuharate režiim)
Back waist mode (Selja ja vöökoha režiim)
Sports recovery mode (Spordist taastumise režiim)
Senior Mode (Eakate režiim)
Relax mode (Lõdvestusrežiim)
Vitality mode (Elujõurežiim)


Hääljuhtimise kasutamine

● Häälkäskluste andmine

Häälkäsklus
A new technique (Uus meetod)
Air pressure massage (Õhusurvemassaaž)
Switch off air pressure massage (Lülita õhusurvemassaaž välja)
Backrest up (Seljatugi üles)
Backrest down (Seljatugi alla)
Legrest up (Sääretugi üles)
Legrest down (Sääretugi alla)
Leg extension (Pikenda sääretuge)
Leg retraction (Lühenda sääretuge)
Speed up (Suurenda kiirust)
Slow down (Vähenda kiirust)
4D Plus (4D tase kõrgemaks)
4D Minus (4D tase madalamaks)
Strong air (Suurenda õhusurvet)
Weak air (Vähenda õhusurvet)
Zero gravity (Kaalutus)
Position reset (Lähtesta asend)
Deep zero gravity (Sügav kaalutus)
Sleep position (Magamisasend)
Foot rollers (Jalalabade rullikud)
Switch off foot rollers (Lülita jalalabade rullikud välja)
Emergency stop (Hädaseiskamine)
Switch off voice function (Lülita hääljuhtimine välja)
Full body massage (Kogu keha massaaž)
Partial massage (Osaline massaaž)
Point massage (Punktmassaaž)
Rollers up (Rullikud üles)
Rollers down (Rullikud alla)
Make it wider (Laienda)
Make it narrower (Ahenda)
Heat function (Soojendamine)
Switch off heat function (Lülita soojendamine välja)
Pause massage (Peata masseerimine)
Continue massage (Jätka masseerimist)

Ettevaatust! 1. See on intelligentne funktsioon, mis tuvastab käskluse võtmesõnade järgi.
2. Seda funktsiooni uuendatakse automaatselt, võib muutuda ilma meeldetuletuseta.

Sisse/välja


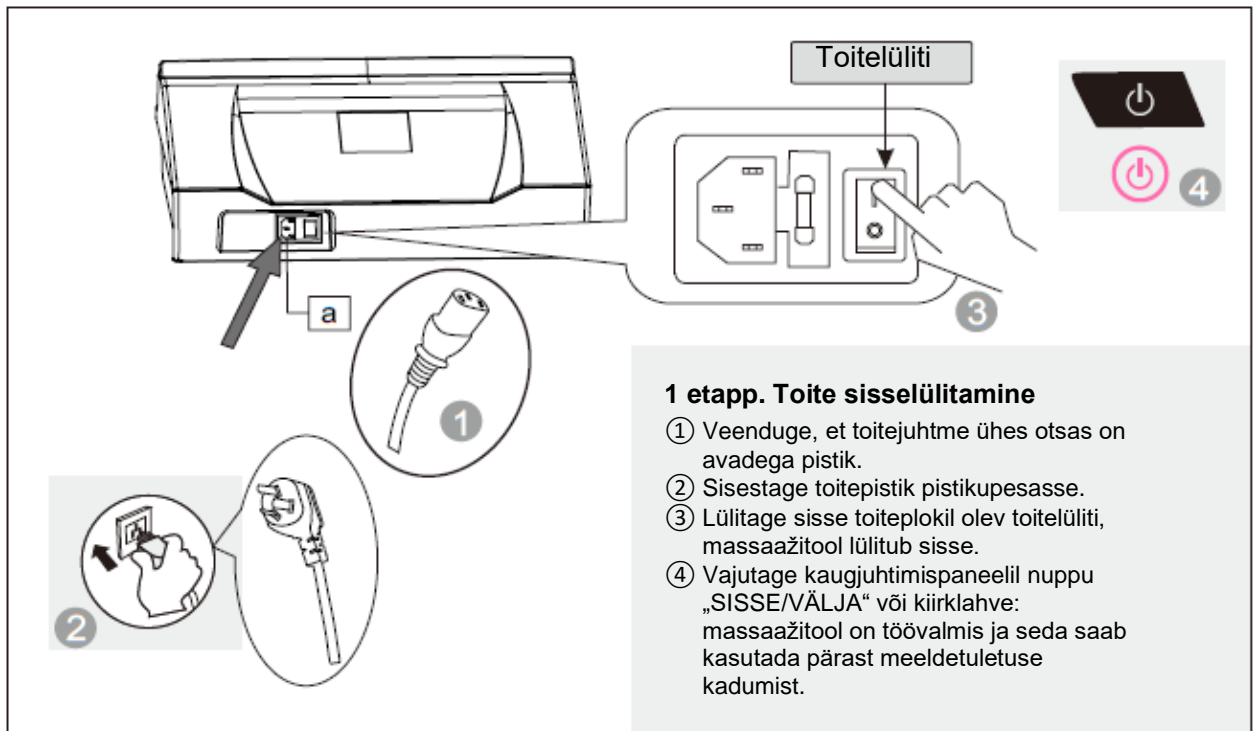


1 etapp. Toite sisselülitamine

- ① Veenduge, et toitejuhtme ühes otsas on avadega pistik.
- ② Sisestage toitepistik pistikupesasse.
- ③ Lülitage sisse toiteploki olav toitelüliti, massaažitool lülitub sisse.
- ④ Vajutage kaugjuhtimispaneelil nuppu „SISSE/VÄLJA“ või kiirklahve: massaažitool on töövalmis ja seda saab kasutada pärast meeldetuletuse kadumist.

2. etapp. Massaaž

- ① Kaugjuhtimistahvli kasutusjuhendi järgi tuleb valida sobiv masseerimisviis. Massaažimeetodite üksikasju vt juhttahvli kasutusjuhendist.
- ② Pärast massaaži lõppemist viiakse massaažiseade algasendisse ja kaugjuhtimistahvel näitab töö lõpetamist.

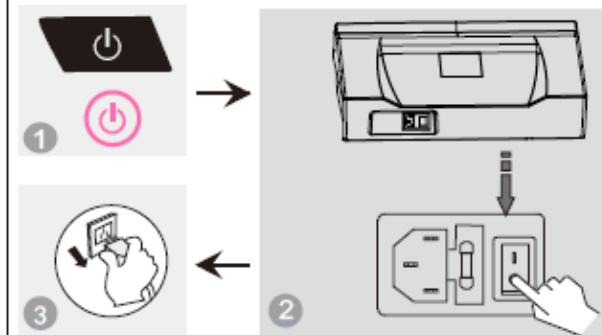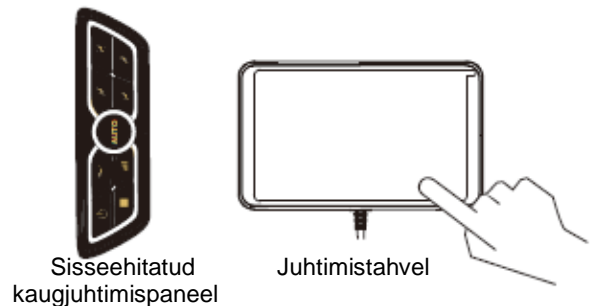

3. etapp. Toite väljalülitamine

- ① Väljalülitamise olekus vajutage uuesti tahvli kaugjuhtimispaneeli, et seade välja lülitada, ning seade salvestab selle automaatselt.
- ② Pärast salvestamise lõppemist lülitage välja toiteploki tagaküljel olev toitelüliti.
- ③ Lõpuks võtke toitepistik pesast välja.



Hoiatus!

- ① Tõstke padi ja seljatoe padi enne kasutamist üles ja kontrollige, et seljatoe nahk ega riie poleks katki. Kahjustuste (ükskõik kui väikeste) esinemisel tuleb seadme kasutamine kohe lõpetada ja eemaldada pistik pesast. Tuleb kutsuda usaldusväärne hooldustöötaja.
- ② Seadme pistikut tohib ühendada vaid sobiva pistikupesaga.



Ettevaatust!

- ① Enne toolile istumist veenduge, et seadmes (sh käetoos, sääre- ja jalatugesed, seljatoos, istmes jne) pole võõrkehi.
- ② Jalatugesedel on ohutusseadmed: kui sääre või jalalabade vahele satub võõrkeha, lõpetavad jalatoed automaatselt liikumise.
- ③ Enne toolile istumist tuleb veenduda, et massaažiseade on oma kohal.
- ④ Seadme kasutamise ajal ei tohi sellel seista.
- ⑤ Toiteploki ülemisel kattel on muljumisvastane ohutusseade. Kui midagi satub toiteploki ja tagumise kätte vahele või kui toiteploki ülemisel kattel on raske ese, lõpetab seljatugi liikumise.

Toimimist illustreerivad pildid


● Säätetugi üles

Selle juhtseadme nupu vajutamisel tõuseb säätetugi üles. Nupu vabastamisel jääb säätetugi seisma, nurk lukustatakse sellesse asendisse.



● Säätetugi alla

Selle juhtseadme nupu vajutamisel laskub säätetugi alla. Nupu vabastamisel jääb säätetugi seisma, nurk lukustatakse sellesse asendisse.

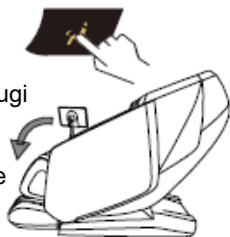

● Säätetugi üles ja seljatugi alla

Selle juhtseadme nupu vajutamisel laskub seljatugi alla ja säätetugi tõuseb üles. Nupu vabastamisel jäävad seljatugi ja säätetugi seisma, nurk lukustatakse sellesse asendisse.




● Seljatugi üles ja säätetugi alla

Selle juhtseadme nupu vajutamisel tõuseb seljatugi üles ja säätetugi laskub alla. Nupu vabastamisel jäävad seljatugi ja säätetugi seisma, nurk lukustatakse sellesse asendisse.




● Sääretoe pikendamine ja lühendamine

Kui sääretoe jõuab maapinna suhtes teatud nurga alla, saab selle pikkust 19 cm ulatuses sobival määral suurendada või vähendada.

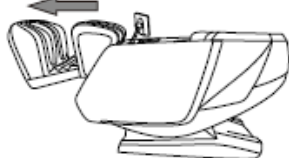


● Kaalutus

Nupu „“ vajutamisel laskub seljatugi alla ja säätetugi tõuseb üles. Nii saavutab tool mugava asendi, milles on esimese kuni kolmanda taseme kaalutus. Tooli viimiseks algasendisse tuleb seda nuppu kolmandat korda vajutada. Seljatugi tõuseb üles ja säätetugi laskub alla.



★ Näpunäited.

Kaalutus põhineb NASA kosmosekapsli lõdvestus-põhimõttel, mis saavutatakse kolme osa (seljatoe, istme ja sääretoe) kombineerimisega mitmesuguste nurkade all. Jalad tõstetakse üles ja istet langetatakse, nii et keha ja jalgade vaheline nurk on 128 kraadi (± 7 kraadi). Nii on süda ja põlved samal horisontaaltasandil, vererõhk väheneb ja kehasurve liigub tuharate piirkonda. Samal ajal suurendab kaalutusnurga all olek inimkeha ja massaažitooli puutepinda, nii et kõigi kehaosade surve jaotub massaažitoolile ühtlaselt. See vähendab südamele ja lülisambale avalduvat survet ning toob kaasa mugava masseerimiskogemuse ja tekitab täielikult lõdvestava, loomuliku ja mugava massaažiasendi.

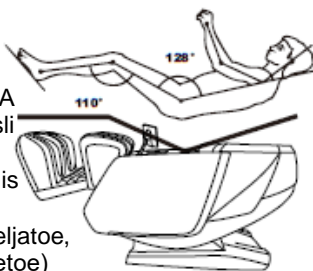

Masseerimine




1. Vigastuste ja varaliste kahjude vältimiseks veenduge, et tooli ümber pole inimesi, lemmikloomi ega asju.
2. Seljatoe reguleerimisel jälgige hoolega seljatoe ja käetugede vahele jäävat tühikut.
3. Sääretoe liikumise ajal ärge seiske sellel ega lahkuge istmelt. Ärge takistage sääretoe liikumist: see kahjustab tooli.
4. Üksikasjalikumad teavet vt juhtseadme juhendist.

Toimimist illustreerivad pildid


● **Käsivarte massaaž**

Käetugedele on sisse ehitatud pulseeriv survemassaaž, mis muljub käsivart ja teeb peopesa akupunktuuri punktidele punktmassaaži, parandab vereringet ja leevendab käte tuimust.

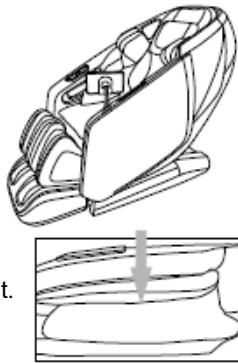


● **Sääremarjade massaaž**

Uuenduslik sääremarjade massaaž hõlmab sääre sõtkumist ja hõõrumist koos sääremarjade rullimise, soojendamise ja õhusurveimpulssidega muljumisega. Jalalihaseid masseeritakse nii, et paraneb vereringe, leevenevad jalavalud ja lihaste energia taastub tõhusalt.

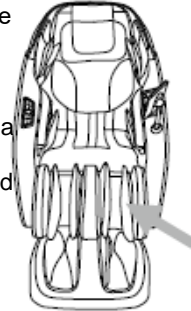

● **Õlgade massaaž**

Mõlema õla jaoks kasutatakse mitmekihilisi survet avaldavaid õhkpatju. Saab teha õlgade venitusmassaaži ja leevendada õlgade väsimust.

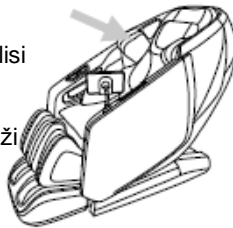


● **Jalgade kinnijäämist vältiv ohutusmeede**

Jalatoe nurga reguleerimisel tuvastab massaažitool automaatselt inimese jalgade pikkuse. Sel ajal ei tohi panna jalgu jalatoe väliskattele, sest see segab jalgade pikkuse määramist ja toob kaasa tõrked jalatoe liigutamisel. Juhttahvli automaatprogrammi kuval on ka meeldetuletus jalgade kinnijäämise vältimise kohta.




● **Vöökoha soojendamine**

Vöökohas kasutatakse traditsioonilisel hiina meditsiinil põhinevat hüpertermiat, mis parandab vereringet, leevendab valusid vöökohas ning kannab hoolt põrna ja mao eest.

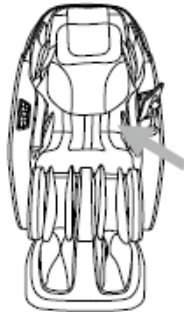

● **Jalalabade rullikumassaaž**

Jalalabade tugi teeb rullikumassaaži ja õhusurvemassaaži. See parandab tallareflekse stimuleerimise kaudu tõhusalt keha vastupanuvõimet ja immuunsust, puhastab kehameridiaanid ja parandab elundite talitlust.

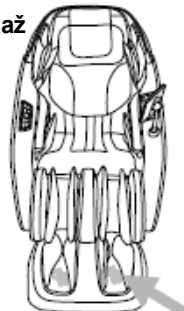


Massaažitooli väljalülitamisel ärge toetage jalgu ega muid kehaosi jalatoele, sest jalatugi jääb seisma. Kui tool jääb algasendisse minekul sellesse olekusse, ei jõua sääre- ja jalatoed ettenähtud asendisse.

Märkus. Toite sisselülitamisel peaks massaažitool minema täielikult lähteolekusse. Seade tuleb uuesti sisse lülitada, vastasel juhul tekib jalgade kinnijäämist vältiva funktsiooni tõrge.


Toiteploki on muljumisvastane funktsioon: kui vastu toiteploki katet surub raske ese või takistus, lõpetab seljatugi liikumise ja jätkab liikumist pärast raske eseme või takistuse eemaldamist.

Massaažitooli viimine algolekusse


- 1 Veenduge, et tooli seljatoe või jalatoe liikumisulatuses pole inimesi, lemmikloomi ega asju.

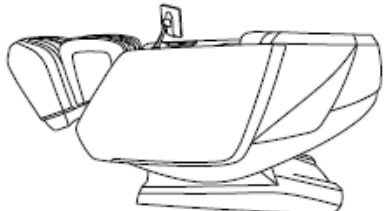


- 2 Viige seljatugi ja jalatugi käsijuhthetadega aeglaselt algasendisse. Seljatugi ja jalatugi liiguvad aeglaselt algasendisse ka lülitinupu allavajutamisel.

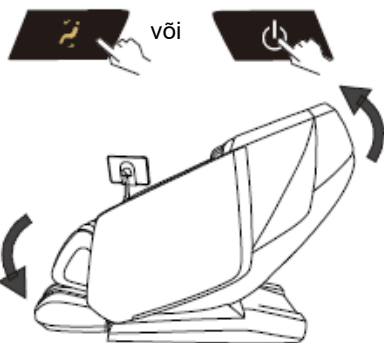

- 3 Pärast algasendisse viimist tuleb käsijuhthetade panna tagasi vasaku käetoole kandurile.

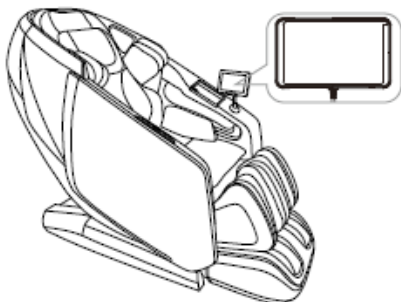

- 5 Lülitage toitelüliti välja.

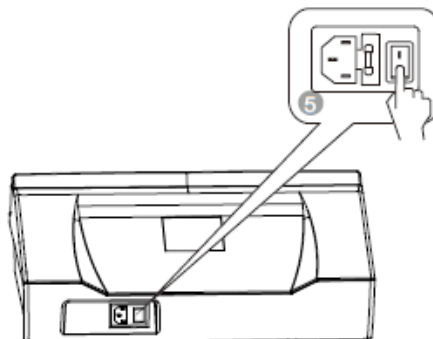

- 6 Võtta toitepistik pesast välja. (Tähelepanu! Pistikut tuleb hoida õigesti!)



- 7 Puhastage ja korrastage seade.



Tähelepanu!

- Pärast massaaži vajutage kogu masseerimise seiskamiseks nuppu „Sisse/välja“ ja oodake, kuni massaažirullikud on kokku kogutud ja oma kohale asetatud. Pärast kasutamist tuleb laste ja lemmikloomade juhusliku vigastamise vältimiseks veenduda, et seade on lahutatud elektrivõrgust.
- Pärast kasutamist tuleb keskkonna kaitseks ja energia säästmiseks toitelüliti välja lülitada ja eemaldada pistik pesast. Pistiku eemaldamisel ei tohi tõmmata juhtmest. Tuleb vältida niiskusest, tolmust ja isolatsiooni lagunemisest tingitud kahjustusi.

Kunstnahk


- **Üldine puhastamine**
Puhastage puhta, pehme ja kuiva lapiga kergelt pühkides.



(Kemikaalide või meditsiiniliste puhastusvahendite kasutamine ei ole lubatud).



Forbiden

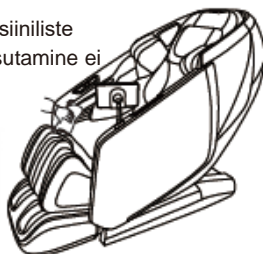

- **Katte määrdumine**
 - 1 Kastke pehme lapp neutraalse puhastusvahendi 3–5% lahusesse, väänake välja ning seejärel eemaldage õrnalt pinnal olev plekk.
 - 2 Peske lapp, väänake välja ja pühkige puhastusvahend ära.



- 3 Puhastage õrnalt kuiva lapiga.
- 4 Laske kuivada (puhuri kasutamine on keelatud).

Lapp

- 1 Kastke lapp nõrga neutraalse puhastusvahendi lahusesse, väänake välja ja puhastage pind.

- (Lahustid, gaas ja alkohol on keelatud.)
Harjake määrdunud osi nõrga neutraalse puhastusvahendiga (vältige liigset harjamist).



Forbiden



- 2 Liigne puhastamine võib kahjustada riiet.
- 3 Pühkige vette kastetud ja väljaväänatud lapiga.
- 4 Laske kuivada.

Plastosad

- 1 Kastke lapp neutraalsesse puhastusvahendisse, väänake välja ja puhastage pind.
- 2 Pühkige vette kastetud ja väljaväänatud lapiga.
- 3 Laske kuivada.




Juhtseadme puhastamine

- 1 Pühkige väljaväänatud pehme lapiga.
- 2 Laske kuivada.
Aerosoolide, lahustite või alkoholi kasutamine on keelatud.



Forbiden

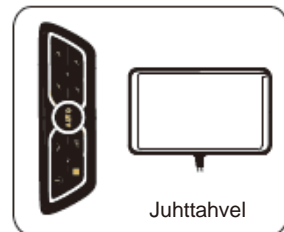

Juhttahvel



Puhastamisest

- Enne puhastamist võtke toitepistik pesast välja. Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Veenduge, et käed on pistikut pesasse pannes kuivad.

- Nimetatud juhendi eiramisel võib kasutaja saada elektrilöögi või põletusi.

KKK ja tõrgete kõrvaldamine

Tõrge	Võimalik põhjus	Tõrke kõrvaldamine
Massaažitool ei hakka pärast toite sisselülitamist tööle.	Kontrollige, kas juhtseade on sisse lülitatud või mitte.	Lülitage juhtseade lülitist sisse.
	Masseerimisfunktsiooni ei ole valitud.	Valige masseerimisfunktsioon.
	Kontrollige, kas pistiku ja pistikupesa vahel on halb ühendus.	Veenduge, et pistik ja pistikupesa on ühendatud.
	Juhe või pistik on kahjustatud.	Laske tootjal või määratud või volitatud hooldustöötajal kontrollida ja asendada.
	Sulavkaitse on läbi põlenud.	Asendage samasuguste tehniliste andmetega sulavkaitsmega.
	Sisemises ahelas on midagi valesti.	Laske määratud või volitatud hooldustöötajal kontrollida ja asendada.
Töötamise ajal kostab massaažiseadmest piiksumist.	Heli võib tekitada pump, mootor või mehaanilised osad.	Tavapärane heli, pole vaja tähele panna.
Vasak rullik ja parem rullik on eri kõrgusel.	Massaažirullikud töötavad vaheldumisi.	Tavapärane töö, ei ole vaja tähele panna.
Töötamise ajal suureneb ootamatult helitugevus.	Kontrollige, kas see on tingitud pikaajalisest töötamisest.	Lülitage toide välja ja laske massaažiseadmehel enne järgmist sisselülitamist vähemalt pool tundi seista.
	Sisemised osad on pikaajalise töötamise tõttu kulunud. See on tavapärane.	Laske määratud või volitatud hooldustöötajal kontrollida ja asendada.
Masseerimine lakkab järsku töötamast.	Elektrikatkestus.	Ühendage uuesti elektritoitega.
	Seatud aeg on lõppenud.	Lülitage toide välja ja laske massaažiseadmehel enne järgmist sisselülitamist vähemalt pool tundi seista.
Seljatuge ja sääretuge ei saa alla lasta.	Kontrollige, kas tegemist ei ole takistuste või tooli ülekoormusega. Mõnikord lõpetab massaažiseade turvalisuse tagamiseks automaatselt töö. Toiteploki peal on rasked esemed.	Eemaldage takistused. Lülitage toide välja ja laske massaažiseadmehel enne järgmist sisselülitamist vähemalt pool tundi seista.
Tool ei lähe algasendisse.	Liigne töötamine, on ületatud seatud tööaeg.	Laske tootjal või määratud või volitatud hooldustöötajal kontrollida ja asendada.
Juhe või pistik on kuum.	Võimalik ülekoormus.	Lülitage toide välja ja laske massaažiseadmehel enne järgmist sisselülitamist vähemalt pool tundi seista.
	Muud kõrvalekalded.	Lõpetage kasutamine. Küsige abi määratud hooldustöötajalt.

Muud



Märkus. Kui tõrked ei ole tingitud ülaltoodud põhjustest, lülitage toitelüliti välja ja eemaldage pistik pesast. Seejärel tuleb tooli parandamiseks ühendust võtta tootjaga või või volitatud hooldusettevõttega.

Tehnilised andmed

Nimetus	Intelligentne massaažitool	Võimsus	260 W
Mudel	RK7602	NW/GW	Põhikorpus: 103/122 kg Käetugi: 13/17, 5 kg
Sisendpinge	<input type="checkbox"/> 120 V~ 60 Hz <input type="checkbox"/> 220 V~ 50/60 Hz <input type="checkbox"/> 240 V~ 50 Hz		
Ohutusklass	I klass	Pakendi mõõtmed	Põhikorpus: 1485 × 805 × 965 mm Käetugi: 1015 × 425 × 620 mm (P×L×K)

Muud

Make your life healthy
and beautiful every day!